



medemagruppen



Bruksanvisning Swing Dusj- og toalettstol

Kjære kunde!

Takk for at du valgte et av våre produkter.

Før du tar produktet i bruk, ber vi deg lese grundig gjennom bruks- og sikkerhetsanvisningene og å følge disse.

Vi tar forbehold om tekniske endringer.

Viktig informasjon!

Sørg for at bruksanvisningen alltid er tilgjengelig i nærheten av produktet. Ta eventuelt en kopi for sikkerhets skyld.

Medema Norge AS



Innhold	Side
Generelle merknader	4
Sikkerhetsanvisninger	4
Bruksområder	4
Bruk	
Sikre dusj- og toalettstolen	5
Justere setevinkelen	5
Regulere setehøyden	6
Tilbehør	
Toalettbøtte	6
Hodestøtte	7
Fotstøtte	7
Montering av fotremmer	8
Montering av hoftebelte	9
Bord med polstret armstøtte	10
Abduksjonskloss med integrert sprutbeskyttelse	10
Todelt PU-innleggspute	11
Pleie og vedlikehold	11
Kassering	12
Tekniske data	12
Konstruksjon	12
Garanti	13



Generelle merknader

Swing er en stabil dusj- og toalettstol til bruk hjemme og på institusjoner. Det anatomisk utformede seteskallet gir ekstra god støtte for barn og ungdom. Den kan brukes både som toalettstol og dusjstol og leveres i fem størrelser. Som toalettstol kan den enten plasseres over toalettet eller brukes frittstående med en toalettbøtte.

Setet på Swing kan reguleres og tilpasses både en aktiv og passiv sittestilling via en gassfjær. Setevinkelen justeres med en pedal. Det er også mulig å regulere setehøyden. Vinkelen og høyden på hodestøtten kan tilpasses til den enkelte pasienten. Det samme gjelder knevinkelen og høyden og vinkelen på den oppfellbare fotstøtten. Overkroppen støttes med et polstret støttebord av rustfritt stål som monteres i festene på skallrammen. Til personer som er ømfintlige for trykk, fås en todelt innleggspute.

Sikkerhetsanvisninger

- Korrekt bruk av produktet forutsetter at behandlingsansvarlig setter seg godt inn i produktet.
- Hoftebeltet skal festes så stramt at pasienten ikke kan gli ut av stolen. Hvis Swing brukes uten benstøtter, øker risikoen for at pasienten kan gli ut av stolen. I disse tilfellene må pasienten være under konstant oppsyn, sittende i stolen.
- Produktet skal bare benyttes under oppsyn.
- Produktet er ikke egnet til transport av personer.
- Maksimal pasientvekt er angitt under punktet "Tekniske data" i denne bruksanvisningen.
- Ved innstillingsarbeid skal pasienten ikke være i kontakt med de bevegelige delene.

Bruksområder

Swing kan brukes som toalettstol over toalettet, frittstående sammen med en toalettbøtte eller som dusjstol. Ta hensyn til følgende:

Over toalettet

Åpne toalettsetet og toalettringen. Tilpass høyden på seteskallet til toaletthøyden. Fjern toalettbøtten. Kjør toalettstolen baklengs over toalettet og lås hjulene.

Frittstående

Det må alltid benyttes toalettbøtte dersom Swing skal brukes frittstående.

Som dusjstol

Swing består av materialer som tåler vann, og kan dermed brukes som dusjstol uten betenkeligheter.

Bruk

Sikre dusj- og toalettstolen



Produktet må sikres ved å låse de fire styrehjulene, slik at stolen ikke triller utilsiktet.

Bremse/låse styrehjulene (med skotuppen):



Bremse/låse styrehjulene

Løsne styrehjulene:

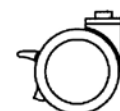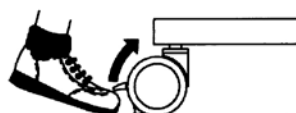

Løsne styrehjulene

NB: Bremsen er kun konstruert for å hindre at stolen triller utilsiktet på flatt underlag.

Justere setevinkelen

Seteskallet kan justeres trinnløst fra (-) 5° aktiv til 30° passiv. For å gjøre dette trykker du på pedalen <pil> plassert foran til høyre på hovedrammen sett i kjøreretningen. Nå kan du justere seteskallets vinkel ved å trykke eller dra lett i skallet. Slipp pedalen igjen.

Pedalen kan sikres mot uønsket betjening ved hjelp av låsestiften (på innsiden av pedalen). Drei låsestiften til den går i inngrep. Beveg om nødvendig lett på pedalen for at stiften skal smekke på plass. Sperrefunksjonen oppheves ved å trekke låsestiften ut og vri den en kvart omdreining.



Regulere setehøyden

Høyden på seteskallet kan reguleres i trinn på 2,5 cm.

For å gjøre dette må du først løsne de to hettemutterne <pilene> på festene mellom skallet og hovedrammen på begge sider. Nå kan høyden på seteskallet reguleres via hullraden. Stram mutterne godt igjen.

Deretter må du etterjustere gassfjæren (bildet under) slik at seteinkelen blir riktig. Dette gjør du ved å skru skruen til gassfjærfestet <pil> helt ut av gjengeplaten og sette den inn igjen i ønsket høyde.

NB: Det må ikke sitte noen i stolen mens innstillingsarbeidet pågår.



Tilbehør

Toalettbøtte

Toalettbøtten føres inn under seteskallet bakfra og skyves så langt inn som mulig. Den smale åpningen sørger for at bøtten holdes på plass og ikke sklir ut.

NB! Etter bruk skal toalettbøtten og seteskallet rengjøres grundig og desinfiseres. Det må kun benyttes vanlige desinfeksjonsmidler.




Hodestøtte

Vinkelen og høyden på hodestøtten kan tilpasses til den enkelte pasienten.

Justere høyden: Løsne skruen **A** og still inn ønsket høyde.

Justere vinkelen: Løsne skruene **B** og **C** og tilpass hodestøtten.

NB: Når justeringen er utført, må alle skruer strammes godt igjen.

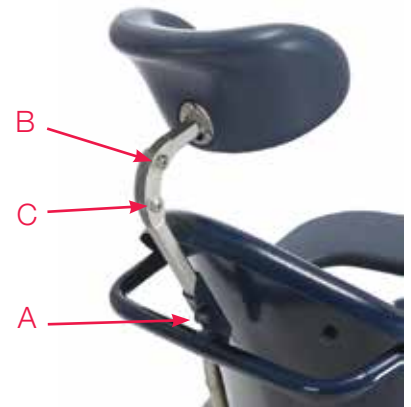**Fotstøtte**


Fotstøttens knevinkel, fotvinkel og høyde kan reguleres, og fotstøtten kan felles opp for å forenkle på- og avstigningen.

Justere høyden: Løsne de to justeringsskruene **A** og still inn ønsket høyde.

Justere knevinkelen: Løsne hendelen **B**.

Justere fotvinkelen: Løsne først kontramutteren **C** og flytt deretter justeringsskruen **D** inn- eller utover for å justere fotvinkelen. Stram til slutt kontramutteren igjen.

NB: Når justeringen er utført, må skruene og hendelen strammes godt igjen.

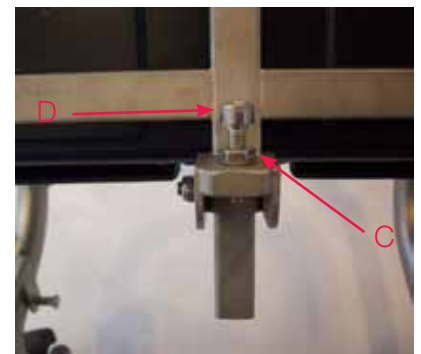

Montering hoftebelte

Monteringssetsen inneholder følgende:

- 2 stk. fotremmer med spenner og maljehull
- 2 stk. M6 insex skruer/ unbrako skruer
- 2 stk. M6 låsemutter
- 2 stk. M6 planskive



1. Mål ut hvor brukeren bør fiksure føttene på fotbrettet.
2. Demonter fotstøtten fra stolen ved å løsne unbrako skruen under setet og trekk fotstøtten ut.
3. Bor opp 6,5 mm hull i oppkanten bak på fotbrettet i den posisjon som passer for brukerens fiksering. Det er forberedt merkinger for hullboring på baksiden.



4. Stikk unbrako skruen gjennom maljen i remmen og gjennom hullet.



5. Fest med skive og låsemutter på baksiden og stram til.



6. Monter fotstøtten tilbake på stolen og prøv ut med bruker.

1. Ta av sommerfuglspenne og før beltedel gjennom det forberedte hull i seteenheten (Fig1)



2. Sett på sommerfuglspenne på beltedel, ved å dra beltet gjennom første hull, over midtsperre og ned i andre hull (Fig.2)



3. Før beltedel tilbake gjennom første hull (Fig.3)



4. Belte er nå korrekt festet og vil ikke løsne, eller gå gjennom hullet i seteenheten (Fig.4)





Todelt PU-innleggspute

For personer som er ømfintlige overfor trykk, leveres en todelt PU-innleggspute. Denne kan enkelt fjernes fra stolen f.eks. når den skal rengjøres (bruk mildt såpevann).

For å fjerne puten trekker du knottene ut av hullene i seteskallet.

Når puten skal monteres igjen, trykker du knottene inn i hullene på seteskallet.



Pleie og vedlikehold

Som ethvert teknisk produkt krever også Swing regelmessig ettersyn. Kontroller derfor dusj- og toalettstolen med jevne mellomrom med hensyn til sprekker, brudd, løse eller manglende deler og/eller funksjonsfeil. Ta produktet ut av bruk dersom det ikke lenger oppfyller alle funksjoner. Ved å ta godt vare på dusj- og toalettstolen vil du ha glede av den i lang tid. Rengjør derfor setet og understellet regelmessig med mildt såpevann. Ikke bruk blekemidler.

Til desinfisering skal det benyttes vanlige desinfeksjonsmidler. Skyll med rent vann og la stolen tørke.

Merk: Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, f.eks. løsemidler, harde børster eller lignende.

Kassering

- Produktet, tilbehøret og emballasjen er ikke vanlig husholdningsavfall.
- Emballasjen, metall- og plastdeler skal leveres til gjenvinning.
- Kontakt kommunens renovasjonsavdeling for lokale avfallsforskrifter.
- Kassering skal skje i henhold til gjeldende nasjonale lover og forskrifter.

Tekniske data

Materiale: Se punktet "Konstruksjon"

Mål:	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Setebredde foran	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Setebredde bak	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Setedybde	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Rygghøyde	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Setevinkel	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°
Høyde på toalettet	47–57 cm	45–55 cm	42–52 cm	42–52 cm	42–52 cm
Total bredde	53 cm	57 cm	63 cm	67 cm	72 cm
Total lengde	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
Maks. belastning	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg



Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EØS for medisinsk utstyr.

Konstruksjon

Seteskallet er laget av UV-bestandig, dyptrukket PE-plast.

Alle metalldeler er laget av rustfritt stål og til dels pulverlakkert.



Garanti

Som en del av våre generelle forretningsvilkår leveres rammene på toalett- og dusjstolen med en garanti på

3 år.

Dersom feilen beviselig kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil, erstattes ødelagte deler uten kostnader. Vi påtar oss intet ansvar for endringer og konstruksjonsmessige inngrep utover normal tilpasning av produktet til brukerens kropp og størrelse.

Med forbehold om tekniske endringer.

NB: Det er ingen returrett på spesialkonstruerte modeller.

Bruk av produkter fra andre leverandører sammen med våre produkter kan innebære risiko. Med mindre produktkombinasjonen er uttrykkelig godkjent av oss, påtar vi oss intet ansvar for skader som skyldes slik bruk.

Mangler som skyldes naturlig slitasje, overbelastning, hardhendt håndtering eller bruk i strid med det fastsatte bruksområdet, dekkes heller ikke av garantien.

Garantien bortfaller dersom det ikke brukes originale reservedeler fra Schuchmann ved reparasjoner.

Forhandlerens stempel:

Serienr.:

Produsent: Schuchmann GmbH
Dütestrasse 3
DE-49205 Hasbergen
Germany

Medema Norge AS
Stamveien 6
1481 Hagan
Tlf: 815 32 400
Fax: 67 06 49 90



Notater:

