


Bytte av kontrollboksen type 574 etter type 576

Bestill en kontrollboks 574 med Medema art nr: 1105-1011. Du mottar en kontrollboks 576N og monteringsmaterialene. Wellco har formontert plasserte signalenheten (BUZZER) i kontrollboksen.

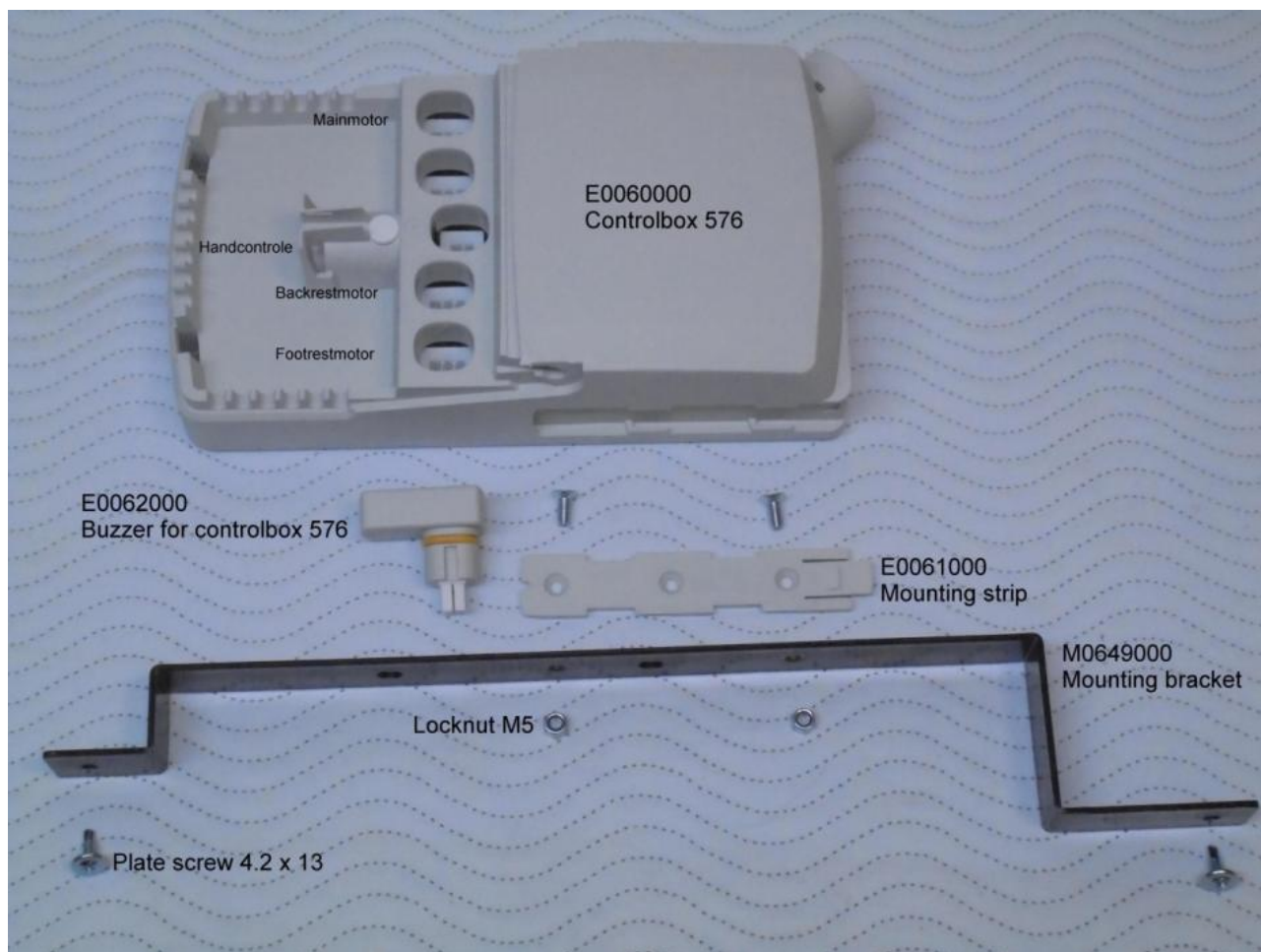

Bytte av kontrollbokstype 574 etter type 576 - versjon 01 - desember 2019

Bytte av kontrollboksen type 574 ti type 576

Bestill en kontrollboks 574 med art nr: 1105-1011. Du mottar en kontrollboks 576N og monteringsmaterialene. Slik går du fram:

- Kjør benstøtten ut i maksimal vinkel
- Reguler stolen til maksimalt setetilt
- Den løse sitteputen er plassert på seterammen med borrelås. Fjern puten.
- Fjern setetavlen ved å bevege ut fotstøtten og løsne de to skruene som kobler sitteplaten foran på mekanismen
- Sett stolen i nøytral stilling.
- Koble strømledningen fra stikkkontakten.
- Se bilde neste side




- Fjern strømkabelen fra kontrollboksen ved hjelp av en skrutrekker




- Fjern strømkabelen fra kontrollboksen med en skrutrekker.
- Koble også de andre kontaktene fra kontrollboksen.
- MERKNAD: i noen tilfeller må ryggstøtten fjernes fra stolen. (Se servicehåndbok)




- Fjern festebraketten ved å skru ut to skruer

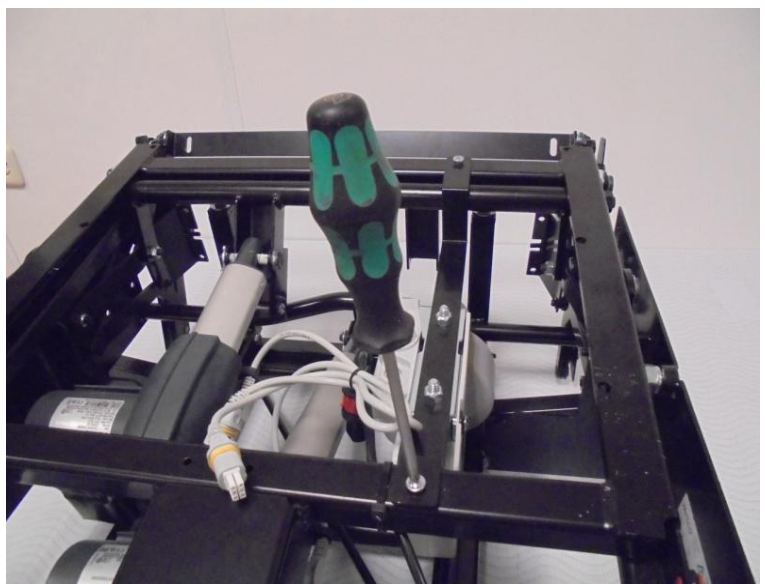

- Klipp stripsen, så kablene blir løse, kablernes retning endres / snues ved ny montering!

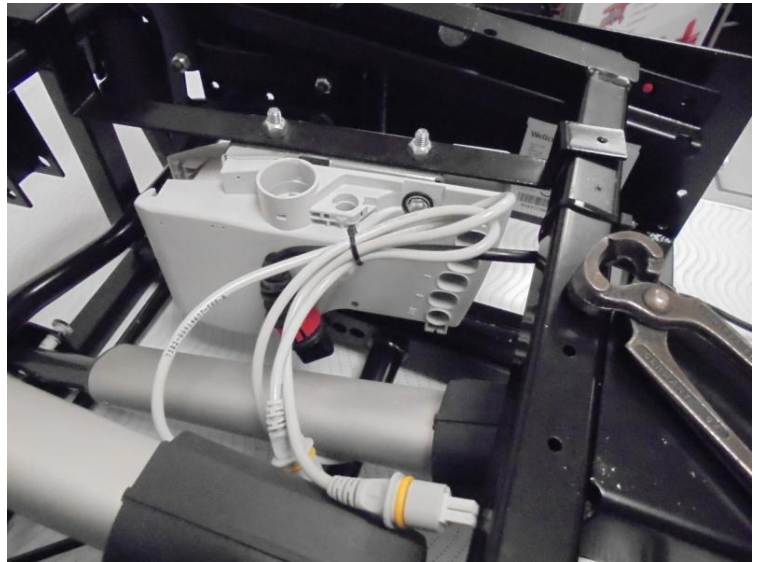

- Sjekk om den nåværende stolen har riktig monteringsbrakett, eller bruk den som følger med utskiftingssettet. Monteringsbraketten med 4 hull er kun gyldig for 574. Monteringskonsollen med 6 hull er gyldig for 576.

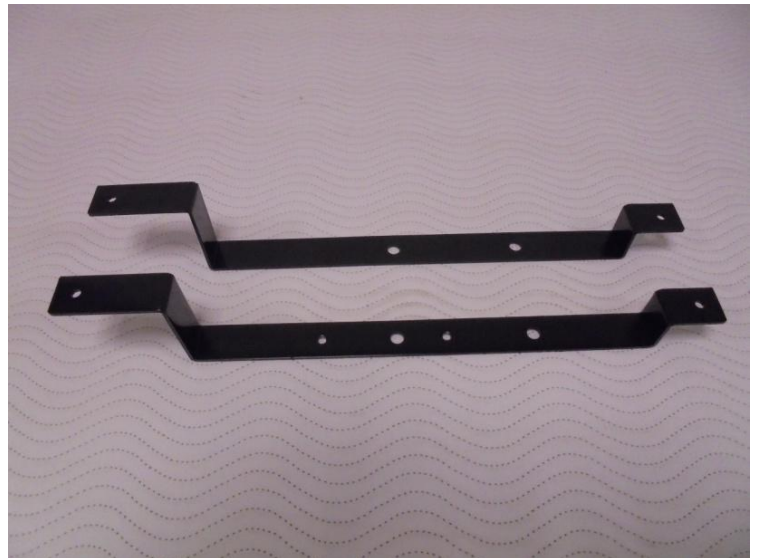


- Monter plastmonteringslisten på monteringsbraketten med M5 skruer og låsemutter




- Skyv monteringsbraketten på kontrollboksen til "klikk".




- Skyv strømkabelen inn i kontrollboksen til "klikk".

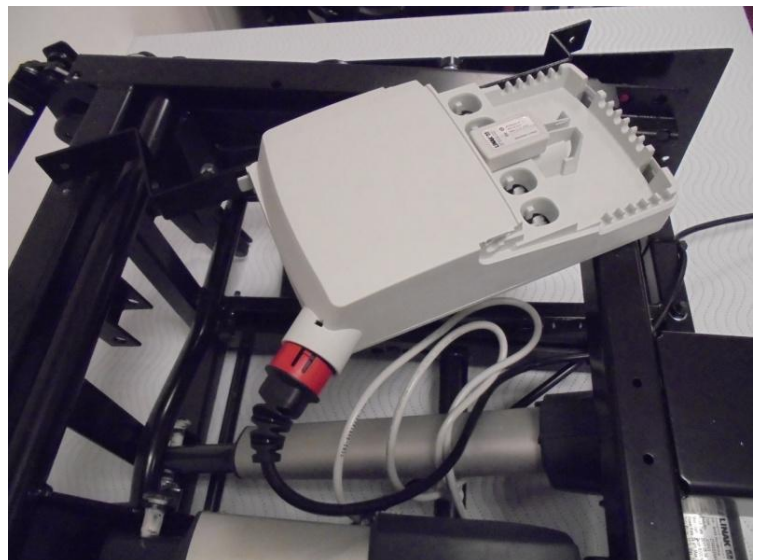


- Plasser monteringsbraketten på mekanismen og bolt den med de 2 skruer 4.2x13.

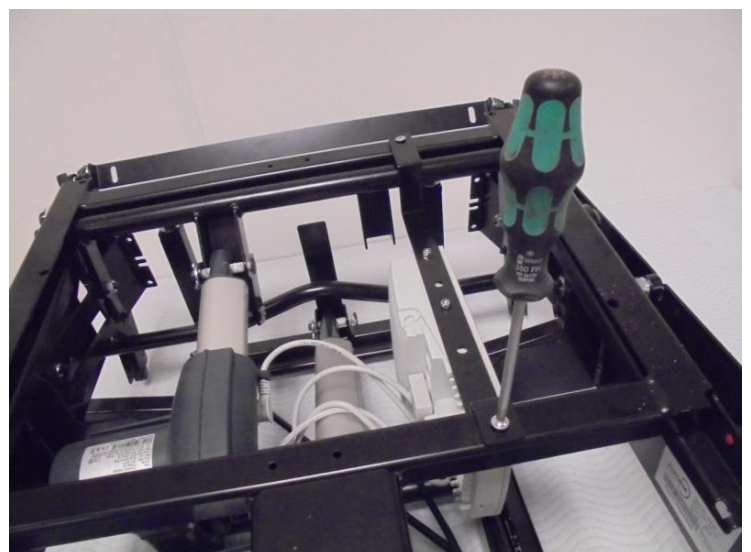

- Ta de rektangulære pluggene fra motorkablene og sett disse i kontrollboksen.

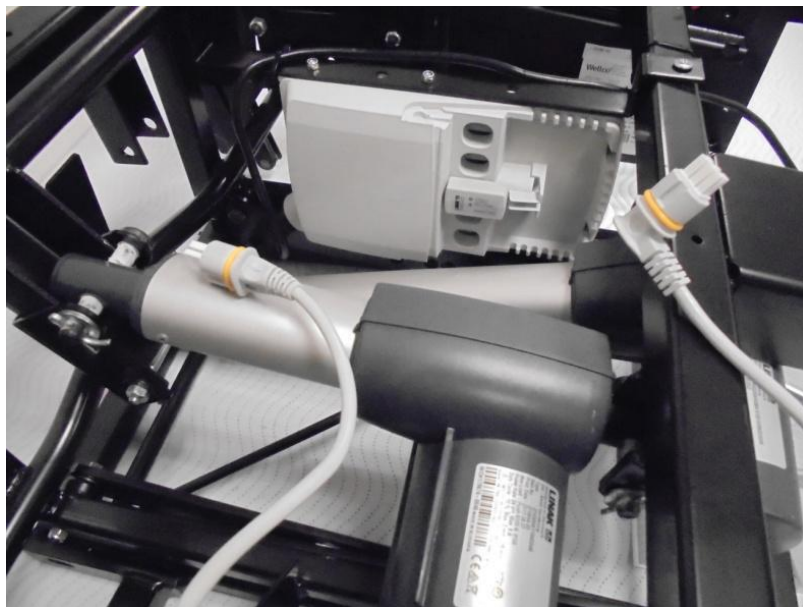


- Sett alle kabelendene i riktig port i kontrollboksen (se side 1)

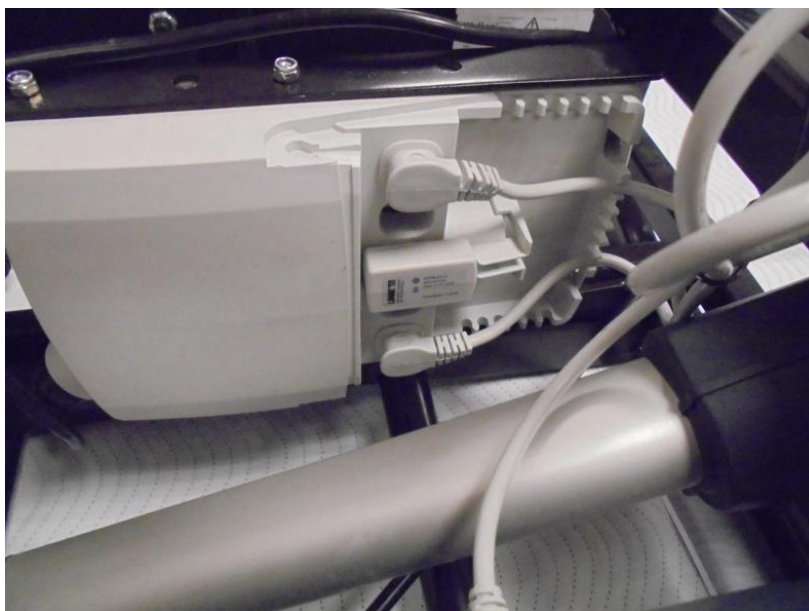

- Bruk sporene i kontrollboksen for alle kabler som brukes.



- Plugg strømmen til stikkontakten og test funksjonene.

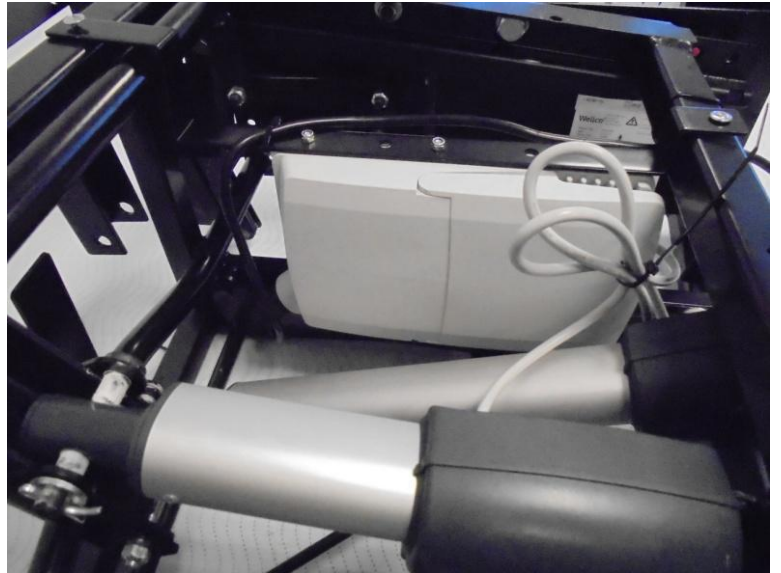

- MERKNAD: ryggstøtten må plasseres tilbake på stolen
- Sett sitteplaten tilbake på sin plassering.
- Plasser seteputen tilbake i sin stilling