

Attende AS  
Forusskogen 9  
4033 Stavanger

Postboks 6  
4064 Stavanger

www.attende.no


Telefon sentralbord 51 70 71 00  
Telefaks 51 57 00 09



STOLEN MÅ IKKE LØFTES ELLER  
VIPPE MED HÅNDTAKET!



Hurtigkobling  
før justering av  
kjørehåndtakene.

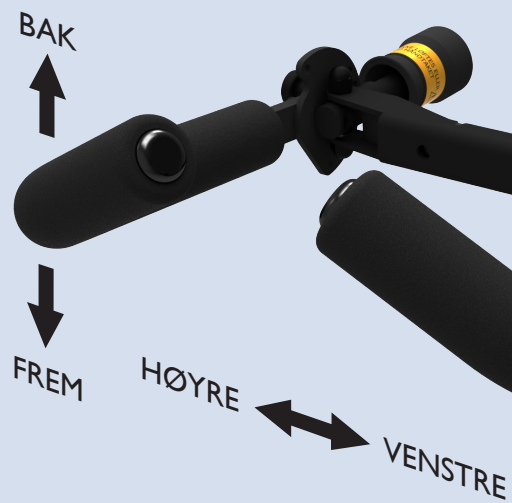

## BRUKSANVISNING LEDSAGERSTYRING 51451

attende®

## TEKNISK INFORMASJON

Dette produktet er konstruert som tilbehør til elektriske rullestoler eller manuelle rullestoler med elektrisk hjelpemotor. Hensikten med produktet er å skape en komfortabel og ergonomisk riktig bevegelse for ledsageren som går bak og styrer stolen.

Enheten er solid og består av komponenter laget i stål, aluminium og plast. Alle deler som er utsatt for korrosjon er overflatebehandlet med en pulverlakk som gir en hard, robust overflate som tåler en del slitasje.

## BRUK AV LEDSAGERSTYRING


Kjørehåndtakene er en "forlengelse av Styreboksen". Når kjørehåndtakene trykkes ned vil stolen bevege seg fremover, løftes håndtakene opp beveger stolen seg bakover. Når man skyver kjørehåndtakene til venstre svinger stolen til høyre og tilsvarende vil stolen svinge til venstre når kjørehåndtakene skyves i motsatt retning. Når man slipper håndtakene går de automatisk tilbake til midtstilling, og stolen vil stanse.

## Justering av kjørehåndtakene

Ledsagerstyringen er utstyrt med en hurtigkobling som gjør at man enkelt kan justere kjørehåndtakene i forskjellige høyder, dette gjør det mulig å regulere håndtakene til en behaglig kjørestilling. Kjørehåndtakene kan også slås helt ned i en "parkeringsstilling" (for å minske plassbehovet) når stolen ikke er i bruk. Dette bør man gjøre under transport og lagring for å minske faren for skader.

## Nødstopp

Nødstopp skal alltid være montert i ladeplugg ved bruk av stolen i bevegelse. Hvis "nødsituasjoner" skulle oppstå og stolens bevegelser må stanses trykkes nødstoppknappen ned. Strømforsyningen blir brutt, og stolen stanser umiddelbart. For å kunne kjøre stolen igjen må nødstoppknappen vis slik at den igjen kommer opp i normal stilling.

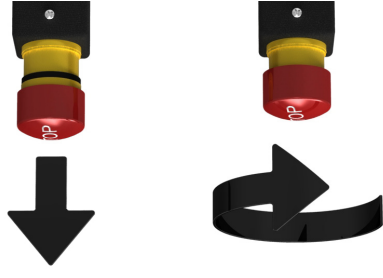

## VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

- Kontroller ledsagerstyringens funksjon jevnlig.

OBS! Hvis ledsagerstyringen ikke oppfører seg normalt må den ikke brukes!  
Kontakt snarest leverandør.

- Sjekk med jevne mellomrom at ledsagerstyringen er godt festet til stolen.
- Kontroller at alle skrueforbindelser på festeplaten, festemateriell og nødstoppen er i orden.
- Skift mosegummen på kjørehåndtakene hvis disse er skadet.

## ERKLÆRING OM SAMSVAR OG GARANTI

Attende AS har levert denne ledsagerstyringen i samsvar med EMC direktiv 89/336/EØF, 92/31 EØF, Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF Maskindirektiv 89/392/EØF Forskrift om elektrisk utstyr

Samsvarserklæring er utstert. CE merket på enheten er beviset på at kravene er oppfylt. I henhold til EU's forskrifter for denne typen utstyr garenteres ledagerstyringen mot fabrikkasjonsfeil i 2 år, forutsatt at enheten er montert med tilpasset festemateriell levert av Attende AS, og at nødstopppbryteren er montert.

Når unormal slitasje oppstår, som følge av "unormal bruk", eks. for store belastningen som oppstår ved bruk av kjørehåndtakene som "løfteredskap", må fjærhuset komplett, med varenummer 41984, skiftes.

OBS! Man må aldri benytte ledsagerstyringens kjørehåndtak/hendler til å løfte eller vippe stolen over fortauskanten og liggende! Dette kan medføre deformering av enkelte komponenter inne i enheten, som igjen vil gjøre at enheten ikke fungerer tilfredsstillende.