

PRODUKTINFORMASJON MC1124 MED FORMSTØPT SITTEHET SPINALUS-2

Skytta 28.01.22

- Stolen leveres fra oss som standard stol uten sete og ryggpute.
Det vil variere hvordan den formstøpte sitteenheten monteres/tilpasses.



Medema Norge AS


Stamveien 6
1481 Hagan
Postboks 133
1483 Skytta

966 250 003 mva

T +47 67 06 49 00
firmapost@medema.no
www.medema.com

- Det er laget ett adapter beslag til rygg som enkelt løser de fleste monteringer.

| | |
|-----------|--|
| 2406-1600 | Adapterplate montering av støp Spinalus2 |
|-----------|--|

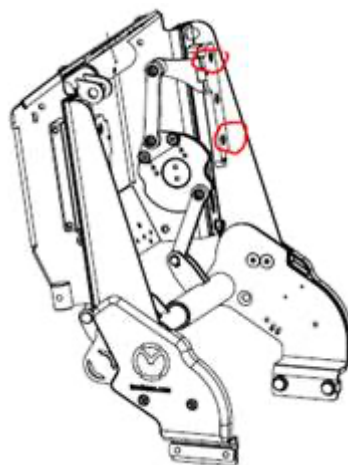

Hvis adapterplate eller ryggammen ikke brukes bør støpe skallet forankres i Rygggrammens

- Det vanligste oppsettet + stol og øvrig tilbehør.


| Art.nr | NAV | Varenavn | | |
|-----------|--------|---|----|---|
| 2421-1150 | 263978 | Setepute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 std anatomisk | -1 | |
| 2421-1154 | 263979 | Ryggpute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 std anatomisk | -1 | |
| 2406-1600 | 269945 | Adapterplate montering av støp Spinalus2 | | 1 |
| 2406-1061 | 269946 | Ryggvinkel begrensning switch kit spinalus2 | | ? |



medemagruppen

- Ryggregulering brukes sjelden på formstøpte sitteenheter. Men stolen leveres med ryggregulering! Så må man ved montering finne rett vinkel og koble den ifra. Den bør også programmeres bort fra styreboksen, men det kan ikke gjøres før den formstøpte sitteenheten er montert.
- Det kan være nødvendig å begrense hvor mye ryggen skal kunne vinkles dersom den formstøpte sitteenheten er delt og rygg skal kunne reguleres. Det kan være nødvendig å begrense ryggvandring både frem og tilbake, da kan man montere ett switch kit i begge sider av Spinalus-2 setet. Angi fra-til ryggvinkel som ønskes.

| | |
|-----------|---|
| 2406-1061 | Ryggvinkel begrensning switch kit spinalus2 |
|-----------|---|

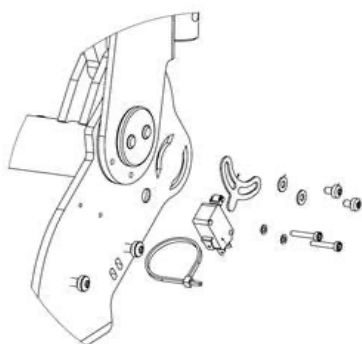

Husk:

- Vi trenger bredden og dybde på den formstøpte sitteenheten for å forhåndsinnstille Spinalus-2 setet. Angi setebredde 40-45-50 eller 55cm.
- Sjekk behov for alternative armlene, benstøtter og eventuelt hodestøtte.
- Hvem monterer den formstøpte sitteenheten.
- Husk tegninger bilder og god informasjon hvis andre individuelle tilpasninger skal lages.
- Den som skal montere trenger:
 - Brukerid / SF nummer.
 - Høyde på bruker.
 - Vekt på bruker.
 - Hvem tilpasningen er anvist av.

Solidseat fra Ergoseat



Softseat fra Ergoseat



Formstøp fra Etac



Mykstøp fra Hjelpemiddelspesialisten



Med vennlig hilsen
Medema Norge AS

Per Kristian Gustavsen



medemagruppen