


Sideplaten

Betegnelsen for posisjonene på vinkelbeslaget for setebæreren
(Se tabellen «Setehøyde og setevinkel Cleo ved de respektive rammestørrelsene»)

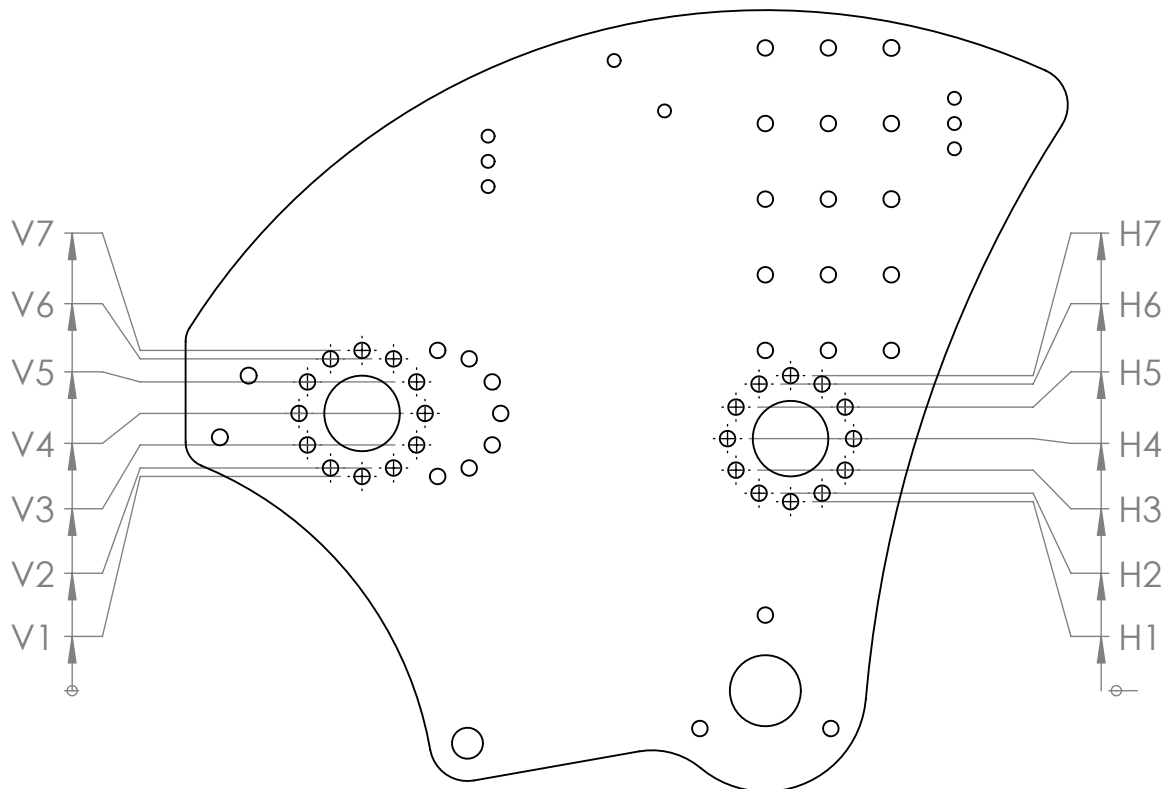

CLEO setehøyde og setevinkel størrelse 1 (Alle angivelsene med vannrett seteplate og 9° cambring)

| | HK-pos H | H1n | H2n | H3n | H4n | H5n | H6n | H1h | H2h | H3h | H4h | H5h | H6h | H7h |
|----------|----------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| HK-pos V | SH | 28 | 28,5 | 29 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 37,5 | 38 |
| V1n | 29 | 3,5° | 2,5° | | | | | | | | | | | |
| V2n | 29,5 | 4,5° | 3,5° | 0,5° | | | | | | | | | | |
| V3n | 30 | 7,0° | 6,5° | 3,5° | | | | | | | | | | |
| V4n | 31,5 | 11,0° | 10,5° | 8,0° | 3,5° | | | | | | | | | |
| V5n | 32,5 | | | | 8,5° | 3,5° | 0,5° | | | | | | | |
| V1h | 33,5 | | | | | | | 3,5° | 2,5° | | | | | |
| V2h | 34 | | | | | | | 4,5° | 3,5° | 0,5° | | | | |
| V3h | 35 | | | | | | | 7,0° | 6,5° | 3,5° | | | | |
| V4h | 36 | | | | | | | 11,0° | 10,5° | 8,0° | 3,5° | | | |
| V5h | 37,5 | | | | | | | | | | 8,0° | 3,5° | 0,5° | |
| V6h | 38,5 | | | | | | | | | | | 7,0° | 3,5° | 2,0° |
| V7h | 39 | | | | | | | | | | | 9,0° | 5,0° | 3,5° |

HK-pos V = Valgt posisjon i hullkransen foran

HK-pos H = Valgt posisjon i hullkransen bak

CLEO setehøyde og setevinkel størrelse 2 (Alle angivelsene med vannrett seteplate og 9° cambring)

| | HK-pos H | H1n | H2n | H3n | H4n | H5n | H6n | H1h | H2h | H3h | H4h | H5h | H6h | H7h |
|----------|----------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| HK-pos V | SH | 31 | 31,5 | 32 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 41 |
| V1n | 32 | 3,5° | 2,5° | | | | | | | | | | | |
| V2n | 32,5 | 4,0° | 3,5° | 0,5° | | | | | | | | | | |
| V3n | 33 | 6,5° | 6,0° | 3,5° | | | | | | | | | | |
| V4n | 34,5 | 10,0° | 10,0° | 7,5° | 3,5° | | | | | | | | | |
| V5n | 35,5 | | | 11,5° | 7,5° | 3,5° | 0,5° | | | | | | | |
| V1h | 36,5 | | | | | | | 3,5° | 2,5° | | | | | |
| V2h | 37 | | | | | | | 4,0° | 3,5° | 0,5° | | | | |
| V3h | 38 | | | | | | | 6,5° | 6,0° | 3,5° | | | | |
| V4h | 39 | | | | | | | 10,0° | 10,0° | 7,5° | 3,5° | | | |
| V5h | 40,5 | | | | | | | | | 11,5° | 7,5° | 3,5° | | |
| V6h | 41,5 | | | | | | | | | | 11,5° | 7,0° | 3,5° | 2,0° |
| V7h | 42 | | | | | | | | | | | 8,5° | 5,0° | 3,5° |

HK-pos V = Valgt posisjon i hullkransen foran

HK-pos H = Valgt posisjon i hullkransen bak

CLEO setehøyde og setevinkel størrelse 3 (Alle angivelsene med vannrett seteplate og 9° cambring)

| | HK-pos H | H1n | H2n | H3n | H4n | H5n | H6n | H1h | H2h | H3h | H4h | H5h | H6h | H7h |
|----------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| HK-pos V | SH | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45 |
| V1n | 36 | 3,0° | 2,5° | | | | | | | | | | | |
| V2n | 36,5 | 4,0° | 3,0° | 0,5° | | | | | | | | | | |
| V3n | 37 | 6,5° | 6,0° | 3,0° | | | | | | | | | | |
| V4n | 38,5 | 10,0° | 9,5° | 7,0° | 3,0° | | | | | | | | | |
| V5n | 39,5 | | | 11,0° | 7,5° | 3,0° | 0,5° | | | | | | | |
| V1h | 40,5 | | | | | | | 3,0° | 2,5° | | | | | |
| V2h | 41 | | | | | | | 4,0° | 3,0° | 0,5° | | | | |
| V3h | 42 | | | | | | | 6,5° | 6,0° | 3,0° | | | | |
| V4h | 43 | | | | | | | 10,0° | 9,5° | 7,0° | 3,0° | | | |
| V5h | 44,5 | | | | | | | | | 11,0° | 7,5° | 3,0° | 0,5° | |
| V6h | 45,5 | | | | | | | | | | 10,5° | 6,5° | 3,0° | 2,0° |
| V7h | 46 | | | | | | | | | | | 8,0° | 4,5° | 3,0° |

HK-pos V = Valgt posisjon i hullkransen foran

HK-pos H = Valgt posisjon i hullkransen bak