



medemagruppen



## Montering og innstilling av støttehjul

Slik monterer du støttehjulene:

1. Ta bort sykkelens originale muttere på bakhjulets navstang.
2. Sette støttehjuls ramme over sykkelens originale bakhjul. OBS: Det kan være nødvendig å ta bort sykkelens originale bagasjebrett for vellykket montering.
3. Plasser bakhjulets navstang i de forberedte huller i støttehjuls ramme (S)
4. Spenn etter med sykkelens originale muttere.
5. Fest støttehjuls ramme øvre del i bagasje brett festene øverst på sykkelrammen. (K)
6. Etter spenn alle skruer!



## Stille inn støttehjulene


Støttehjulene er utstyrt med **fjærings elementer**, som kan gi myk og behagelige kontakt mot underlaget.

Slik stiller du inn ønsket styrke i fjæring:

Løsne skruen (A) og juster fjærings element i sporet, til ønsket styrke er oppnådd.

Ved å løsne de to skruene (B) kan **avstand fra bakket til støttehjulene** justeres.


Etter at alle justeringer av skruer er gjort, etter stram alle skruer.

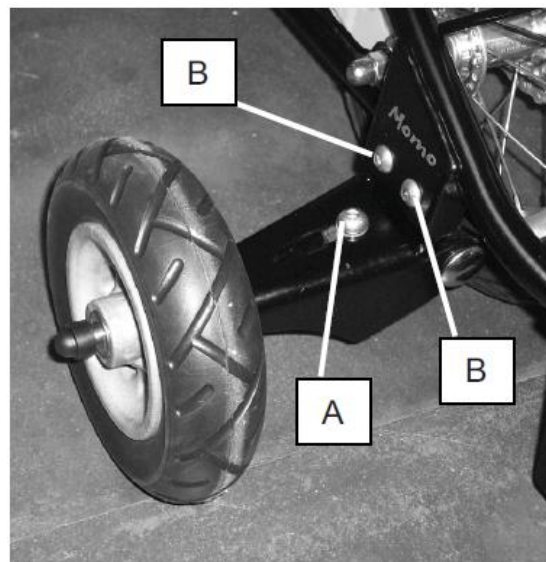

I tillegg kan fjæringen begrenses i utslag.

Slik går du fram: Løsne låsemutteren (C) under støttehjulsfestet. Ved å skru eller løsne skruen (D) kan fjærings område begrenses.

Etter at alle justeringer av skruer er gjort, etter stram alle skruer

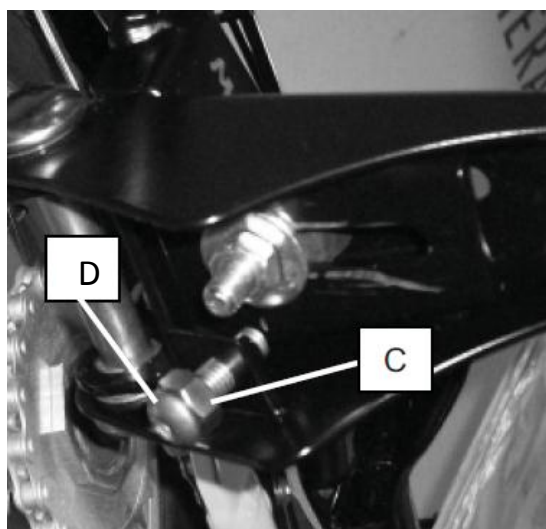

## De første forsøk

Nå som du har justert komponentene på støttehjulene, slik de passer brukerens vekt og størrelse, er det på tide med den første sykkeltur.

Vær oppmerksom på at du fra den første uavhengige sykkeltur med støttehjulene montert på sykkelen bør øve med en voksen særlig i svingene, der støttehjulene yter maksimalt.

Vær oppmerksom på at den bredeste delen av sykkelen din er bak deg. Beregne derfor tilsvarende hindringer til bredden på sykkelen.

## Stell og vedlikehold Momo støttehjul

- Kontroller at alle skruer og muttere på hjulene er festet stramt
- Sjekk lufttrykket i dekkene. Les av maksimalt trykk på dekkene.
- Kontroller mønsterdybden på dekkene.
- Rengjør støttehjulene for hår rester og annet smuss, om nødvendig har det re-oljet og justert
- Olje skruefester for regulering av fjæring og avstand til underlag
- Kontroller felgene for slark. Kontroller og eventuelt juster / etter spenn.
- Kontroller støttehjuls ramme for skader og skift støttehjuls sats om nødvendig.

## Vedlikehold av støttehjul generelt

For at støttehjulene skal fungere trygt og se bra ut, må de vedlikeholdes Vennligst følg disse instruksjoner:

- Regelmessig, riktig pleie vil bevare sykkelen. For å forhindre rust og andre skader, følg disse instruksjonene:
- Ikke la smuss tørre på støttehjulene, alltid fjerne det med vann og en myk klut eller svamp. Ikke høytrykksvasker bruk fordi den kan skade lakk.
- Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler. Bruk mildt såpevann til rengjøring.
- Reparerer Umiddelbart lakk skader.



**medemagruppen**