



medemagruppen




Monteringsanvisning
- LOTUS Care armlensats

LOTUS Care armlensats er tilpasset bruk sammen med LOTUS Care og Jasmin bidétilsatser.

Den kan monteres med begge eller bare ett armlen etter behov. På armlensats med Auto-bryter for betjening av LOTUS Care kan armlen med bryter monteres på høyre eller venstre side etter eget ønske/behov.


- 1. Avmonter plastfestet til bidétilsats fra stålplaten som medfølger bidétilsatsen.**

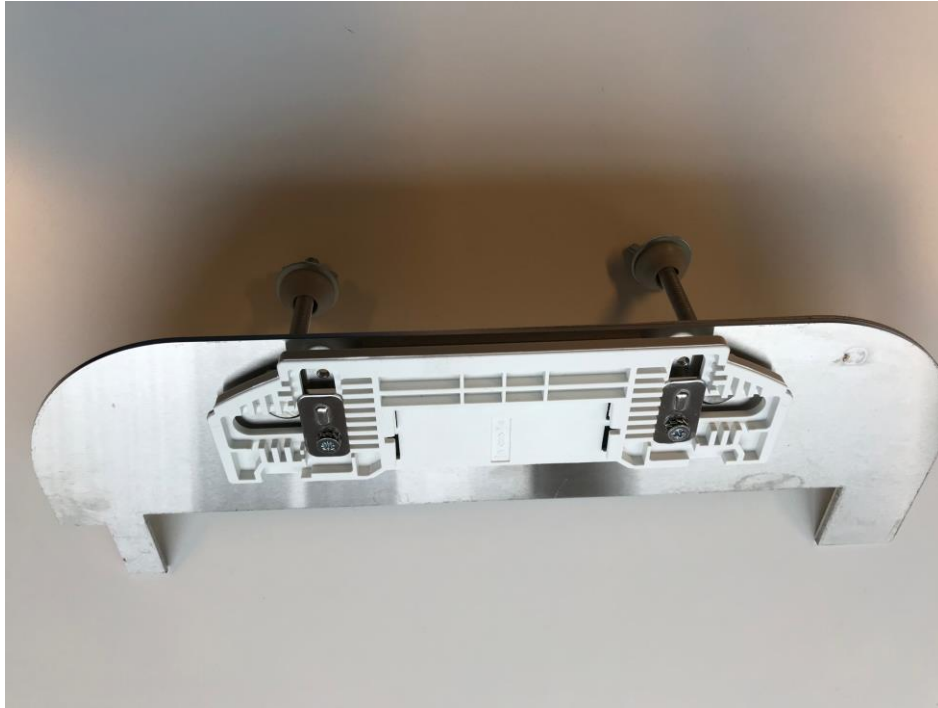


- 2. Bolter, skruer og plastfestet skal heretter monteres på armlensmodul.**



3. Bolter plasseres i de forberedte hull i armlensmodul.

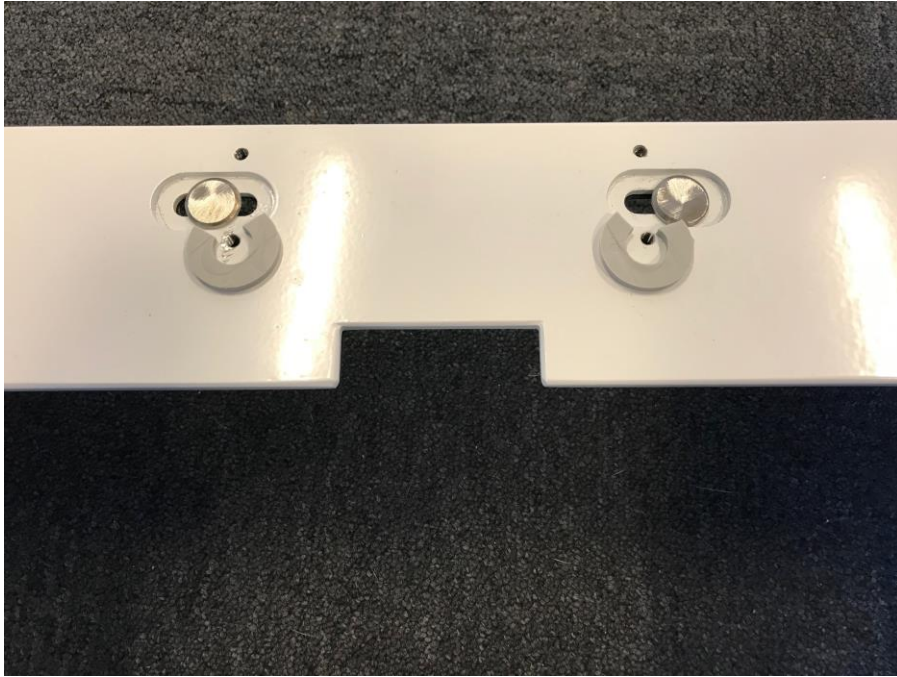

4. Skru fast plastfestet på armlensmodul.

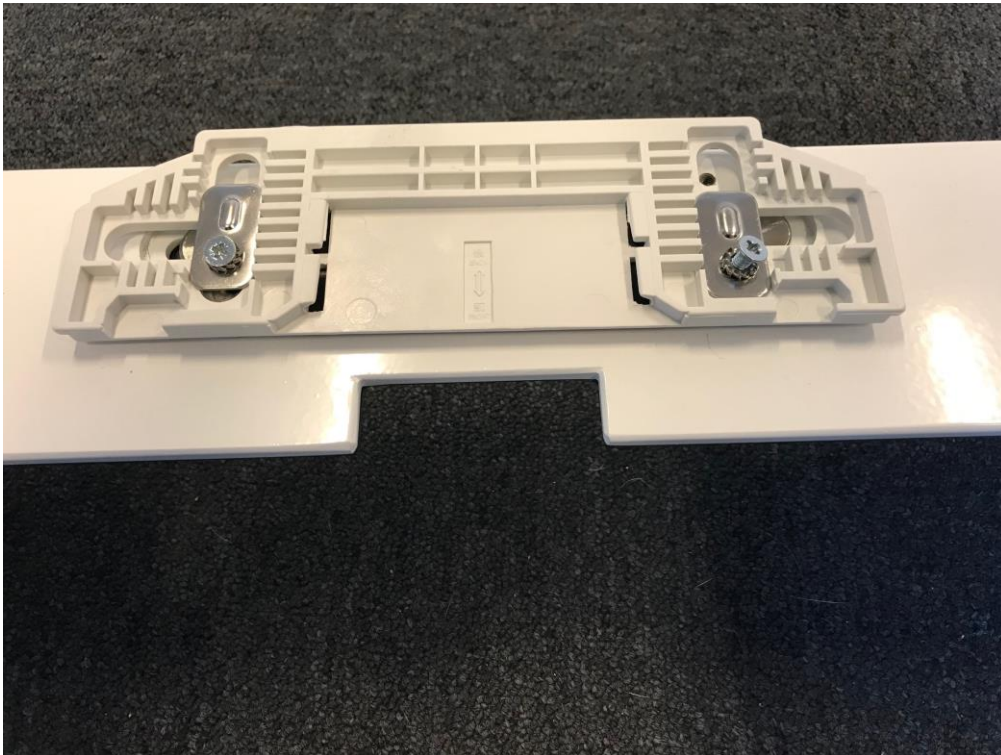

5. Ta av mutter og fjærskive, spennskive skal sitte innerst.



6. Monter aktuelle armlen med mutter og fjærskive, sett på hvit plasthette



7. Monter så armlensatsen på toalettet med vingemuttere, juster plastfestet til korrekt posisjon og monter bidétilsatsen.



Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta

Telefon: 67 06 49 00

Telefaks: 67 06 49 90

e-post: firmapost@medema.no

Web: www.medema.no

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.