


Tilkobling av eksterne AUTO-brytere til LOTUS Care XL

AUTO 1 programmet på LOTUS Care XL kan betjenes med eksterne brytere. I sortimentet finnes det flere forskjellige typer brytere for montering på vegg, på braketter og på armlener. I tillegg finnes det originale armlener med integrert bryter, samt at det på toalettløfter R2D2 er ferdige brytere for samme formål.

Felles for alle eksterne brytere er at de har en ledning med "Jack-plugg" som skal plugges inn i originalt betjeningspanel.

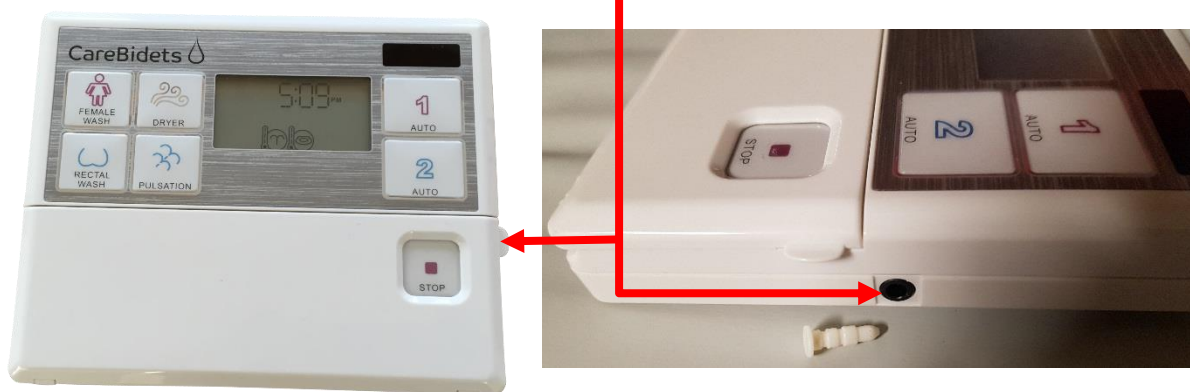

På originale armlener med AUTO-bryter kommer ledningen ut i bakkant av armlenet, denne trekkes ut og plugges inn i betjeningspanelet.

På R2D2 toalettseteløfter ligger det ferdige ledninger i bakkant av løfteren på begge sider, velg den siden som passer best for bruker:

Bryterne er plassert i fremkant under armlener:

