



medemagruppen



**Monterings- og bruksanvisning
Søsterhjelp 799**


Søsterhjelp 799 er konstruert for å hjelpe brukeren til posisjonsendring eller oppreising fra seng eller stol.

Montering

1. Plasser basen (A) på gulvet
2. Sett rammerøret (B) ned i senter på basen, påse at det går helt ned til gulvet og stram til fingerskrue (C)
3. Plasser bøylene (D) i rammerøret og påse at den passerer fingerskrue (E), stram til.
4. Plasser stroppen (F) på bøylene mellom de to stopp-pinnene.
5. Juster lengden på stroppen slik at håndtaket (G) er i riktig høyde for bruker.

VIKTIG!

Før søsterhjelpen tas i bruk, sjekk at alle skruerforbindelser er strammet godt til.

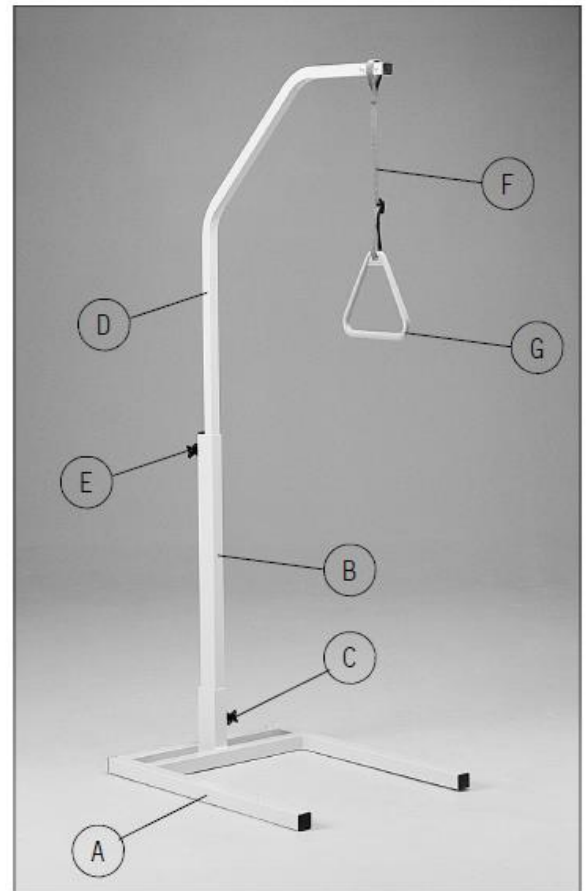

Søsterhjelp 799 rengjøres med en myk klut og mildt såpevann. Ved behov kan det benyttes standard desinfeksjonsmidler benyttet innen helsesektoren.

Etterse produktet jevnlig slik at sikkerheten ivaretas. En skadet søsterhjelp skal ikke brukes før kyndig personell har vurdert og eventuelt utbedret skaden.

Maksimal brukervekt: 125 kg
Total høyde: 187 cm
Høyderegulering håndtak: 95 -131 cm fra gulv
Understell bredde x dybde: 610 x 795 mm

Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta

www.medema.no