




medemagruppen



Monteringsanvisning

- **R2D2 toalettseteløfter**

R2D2 toalettseteløfter med U-ramme

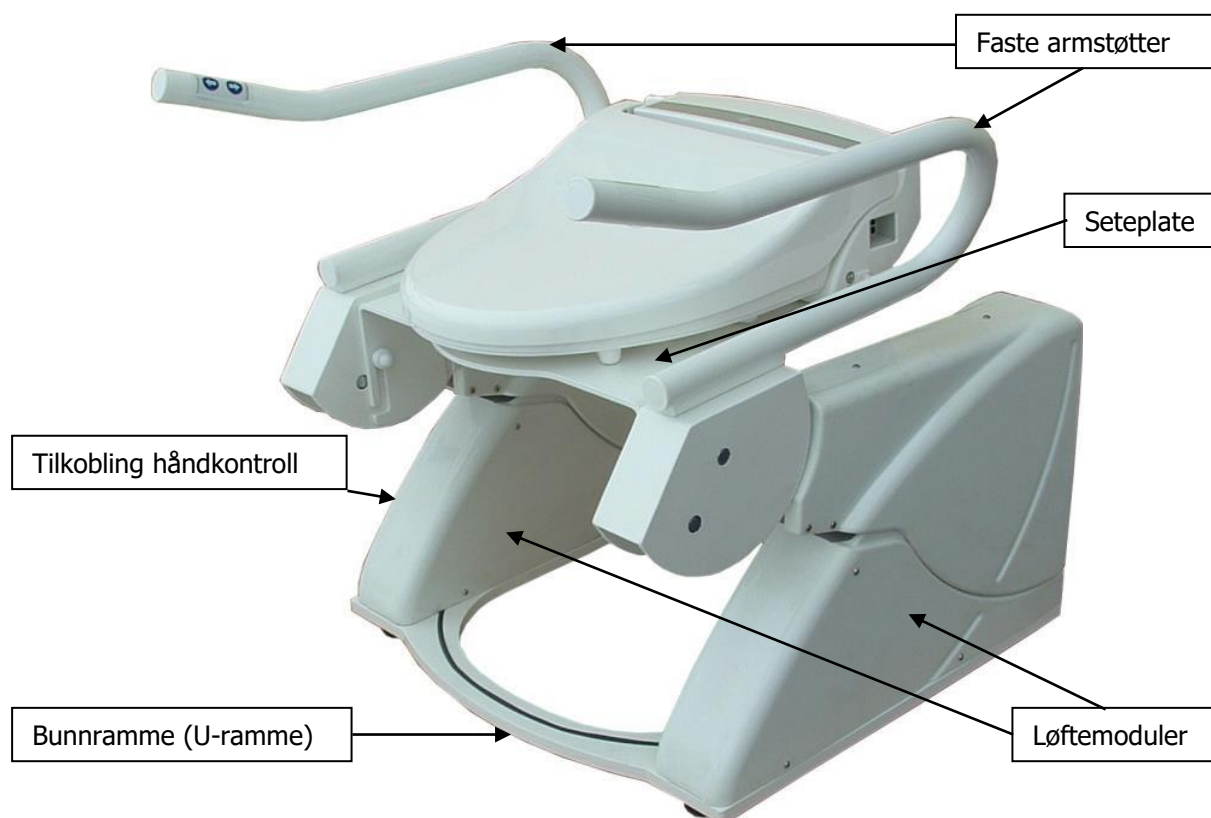

Innhold i eske:

Pos.:	Beskrivelse:	Antall:
1	Løftemoduler	2
2	Bunnramme	1
3	Justerbare føtter	4
4	Koblingskabel m/dekklist	1
5	Festelementer for bunnramme	1
6	Seteplate	1
7	Festelementer for seteplate	1
8	Sett av sikringsvinkler	1
9	Monteringsanvisning	1
10	Bruksanvisning	1

1. Montering av bunnramme

Bunnramme underside



Bunnramme overside



1. Ta ut høyre og venstre løftemodul fra esken
2. Velg ønsket alternative festepunkt og skru sammen bunnramme og løftemoduler løselig
3. Monter justerbare føtter på bunnrammen
4. Trekk ut kontaktene for motor i fremkant underside på begge løftemoduler
5. Koble løftemodulene sammen med koblingskabel og legg denne i sporet på bunnramme.



6. Når kontaktene er koblet sammen, stram til boltene for begge løftemoduler, påse at de står i samme posisjon.

Tips: Løftemoduler kan justeres fremover/bakover ca. 2 cm.

2. Montering av seteplate



Løsne boltene



Monter seteplate som vist på tegning, og stram løselig til



3. Tilpassing og justering

1. Plasser R2D2 over toalettskålen
2. Plugg inn R2D2 i egnet strømuttak
3. Kjør R2D2 i laveste posisjon
4. Juster høyde på seteplate til ca. 3 cm over toalettskål og stram til skruene
5. Finjuster eventuelt R2D2 med de justerbare føttene på bunnramme
6. Legg dekklist for koblingskabel i sporet i bunnrammen
7. **VIKTIG! Hvis brukeren er tung eller bruker stor kraft på armlen ved forflytning må de medfølgende sikringsvinkler monteres. Disse monteres i bakkant av hver løftemodul og forankres mot gulv med bolter eller lim (Tech-7 eller lignende).**

Tekniske data

Spenning:	230V
Strøm:	0,75 A
Kapsling:	IP66
Brukervekt:	150 kg

Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.