



medemagruppen

Montering av brems på ledsagerstyring sykkel 3-18 Momo

Du trenger følgende verktøy:

Vannpumpetang

Avbiter

Stjerneskrutrekker

Unbrako sett

Løsne skrue til feste av bremsewire.



Monter en 6 mm skive på original skrue.





medemagruppen

Monter brakett for dobbel bremsewire.



Brakett og bremsewire ferdig montert (sett fra siden)





Stripse fast wire i ferdige fester på rammen.
Husk god lengde på bremsewire så den ikke blir for kort når man skal svinge.



Husk god lengde på bremsewire så den ikke blir for kort ved justering av høyden på ledsagerstryingen.



medemagruppen