

## Service informasjon FitMotion

Denne informasjonen er laget for å gjøre justeringer eller reparasjoner av en Fitform lenestol. Vi vil påpeke at tilgjengelige alternativer / tilbehør / justeringer på lenestolen kan føre til at situasjonen som ikke er beskrevet her. I tvilstilfeller anbefaler vi deg å alltid kontakte oss. Feil eller ukorrekt endring av lenestolen kan føre til at produsentens garanti utløper, og Wellco er heller ikke ansvarlig for negative konsekvenser i slike tilfeller.


### 1. Linak elektronikk fitMotion



Main actuator (Rise/Tilt) HS  
Medema art nr: 1105-1045



Legrest actuator HS  
Medema art nr: 1105-1046

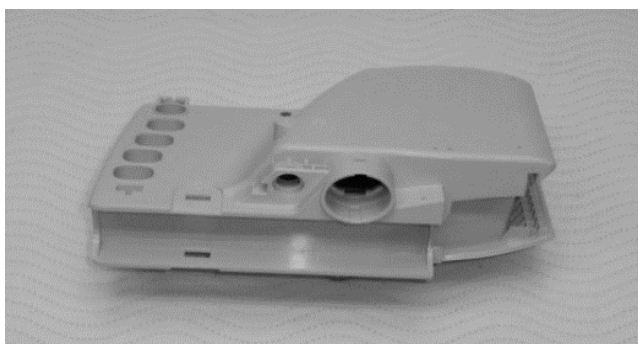

Controlbox fitMotion  
Medema art nr: 1105-1053




Backrest actuator HS  
Medema art nr: 1105-1044




Connecting cable  
Medema art 1105-1049



Power cable  
Medema art nr: 1105-1048

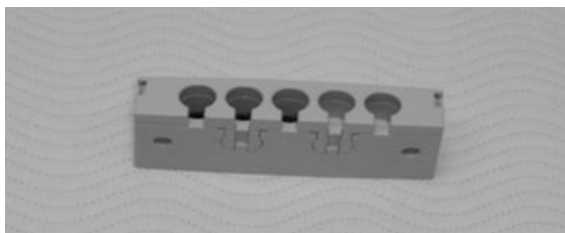


Splitterbox  
Medema art nr: 1105-1052

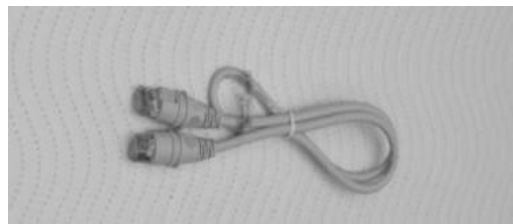

Connecting cable 6W  
Medema art nr:1105-1050



Vibrating unit fitMotion  
Medema art nr: 1105-1054

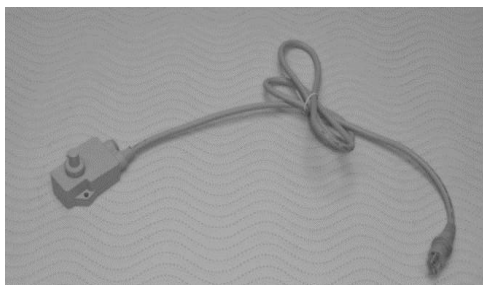

Seat reference switch  
Medema art nr:1105-1051




Handcontrol fitMotion  
Medema art nr:1105-1047



Mounting bracket Controlbox  
Medema art nr: 1105-1055



Suspension bracket Controlbox  
Medema art nr: 1105-1056

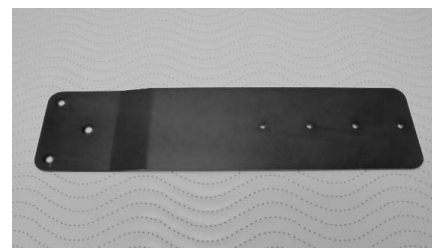

Switch strip seat  
Medema art 1105-1055



## 2. Viktige ting å ta hensyn til

### 2. Viktige ting å ta hensyn til



For å fungere bare når en person sitter i stolen, har setet en såkalt setereferansebryter som reagerer på (kroppsvekt). Når du endrer setedybden til en stol, må du også endre posisjonen til denne setebryteren.

Når setedybden (A) til lenestolen endres, må brakettens posisjon inkludert setebryter (B) også endres med samme antall cm fremover eller bakover, slik at bryteren er i stillingen der setet er helt presset og i kraft.

Med større setedybde, flytt referansebryteren bak.  
 Med mindre setedybde, flytt referansebryteren fremover.

Løsne 3 x skruer (C) - Forstør eventuelt fordypningen (D) i setet - Beveg braketten med setereferansebryter (B) med et antall cm - Stram 3 x skruer -


Trykk setehensvingsbryteren opp, så den ikke berører setet (maks. 1 cm)

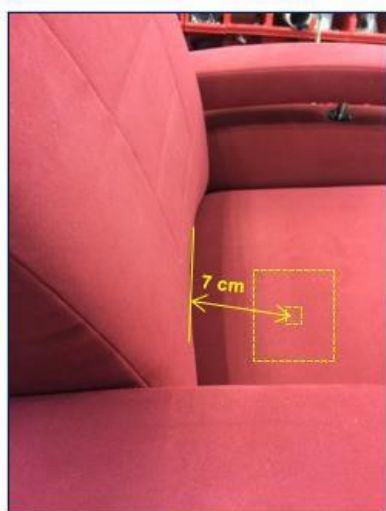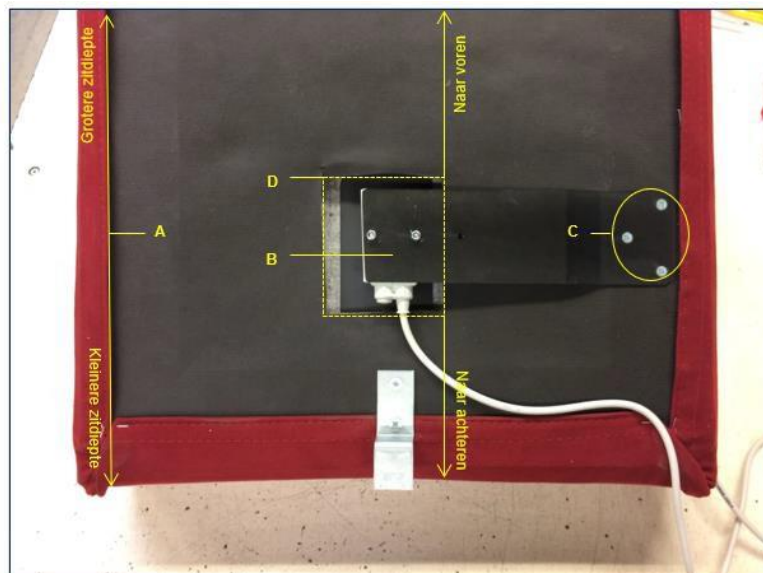

Trykkpunkt sete referansebryter må alltid plasseres ca 7 cm fra ryggen



Når du bytter ut setet, må du plassere det venstre og høyre side likt, slik at fitMotion kan bevege seg fritt.

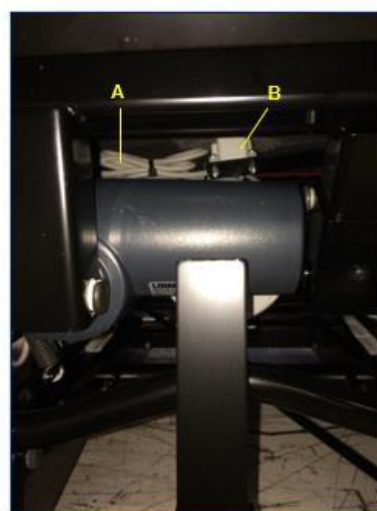


Når du bytter ut kablene (A), plasser dem fritt fra setereferansebryteren (B).

## 1. Sett standard fitMotion på / standard fitMotion av

Når fitMotion-stolen forlater fabrikken og standardinnstillingen satt til "standard på".

Dette kan kontrolleres ved å sitte i stolen. LED-lyset på Fitmotion-knappen vil da lyse automatisk. Så Fitmotion er på.

## 2. Standardinnstillingen kan endres når det ikke er noen bruker er i stolen

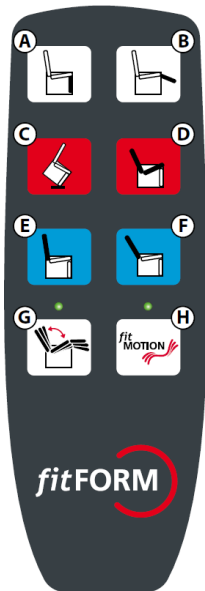


- Trykk og hold de fire øverste knappene (A, B, C og D) på håndkontrollen samtidig i omtrent 8 sekunder, til du hører en pipelyd. Nå er programvare satt til "av som standard".

Dette kan kontrolleres ved å sitte i stolen. LED-lyset på Fitmotion-knappen lyser ikke av seg selv. Fitmotion-funksjonen må slås på manuelt med Fitmotion knappen.

- Ved å trykke på de fire øverste knappene på håndkontrollen igjen (A, B, C og D) samtidig i omtrent 8 sekunder, til du hører en pipelyd, tilbakestilles programvaren til "standard på".
- Denne innstillingen forblir uendret når stolen trekkes ut (og deretter kobles til igjen senere).

## 3. Andre justeringer fitMotion på håndkontrollen

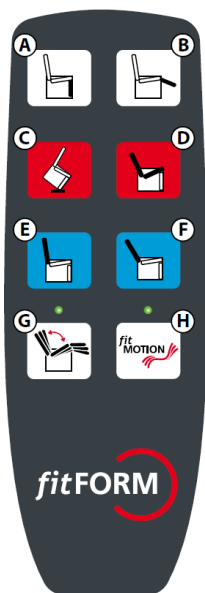

FitMotion håndkontroll for å endre funksjonalitet. Dette kan bare stilles inn når det ikke er noen sittende i stolen!

Tilt ON: Trykk på knappene E og F samtidig i 8 sekunder: 1 pip høres

Tilt OFF: Trykk på knappene E og F samtidig i 8 sekunder: 2 pip høres

Sikkerhetslås PÅ: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder: 1 pip høres

Sikkerhetslås AV: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder: 2 pip høres

### 3. 4. Feilsøking FitMotion

#### Instruksjoner for bruker og tekniker

##### *fitMotion fungerer ikke*

*fitMotion fungerer bare når noen sitter i stolen. Hvis dette er tilfelle og det ikke fungerer, sjekk om stolen er helt nede på gulvet. Av sikkerhetsmessige årsaker fungerer fitMotion ikke hvis stolen er (til og med litt) i heveposisjon. Hvis dette ikke er grunnen, kan du gå inn og ut av stolen et øyeblikk og se om fitMotion begynner å virke etter det.*

##### **Håndkontrollen reagerer ikke**


Sjekk om stolen er i " sikkerhetslås "

Sikkerhetslås PÅ: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder:1 pip høres

Sikkerhetslås AV: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder:2 pip høres

##### **Lys på håndkontrollen flimrer**

**eller stolen lager en pipelyd når du trykker på en knapp og stolen ikke beveger seg. Trykk på knapp C og D nøyaktig samtidig i 8 sekunder. Hold nede til pipelyden stopper. Hvis dette ikke fungerer, bør en tekniker reparere stolen.**

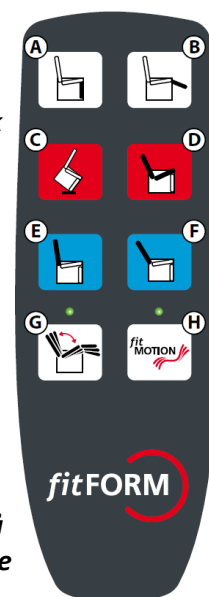

#### Instruksjoner for tekniker


Følg alltid instruksjonene for brukeren. Hvis dette ikke fungerer, er følgende relevant.

##### **Delvis funksjonsfeil**

Dette er for eksempel når benstøtten ikke kommer ut eller går inn, ryggstøtten ikke går tilbake eller fremover, eller tilt- / heisfunksjonen ikke fungerer. Bytt aktuatoren som bruker funksjonen som ikke fungerer. Sjekk også tilkoblingskablene og bytt dem i tilfelle skade.

Etter dette må du tilbake stille systemet helt ved å ta følgende trinn

- a. Trykk på knappen A til aktuatoren slutter å bevege seg
- b. Trykk på knappen D til aktuatoren slutter å bevege seg (når den stopper i nøytral stilling, trykk deretter på igjen til setet + ryggstøtten er helt vipet bakover)
- c. Trykk på knappen F til aktuatoren slutter å bevege seg
- d. Juster stolen til nøytral (null) posisjon (øvre, midtre og understell er nøyaktig lukket, ryggstøtten er rett opp, benstøtten er helt i, stolen er ikke i heving og heller ikke i tilting). Lagre denne nøytrale (null) posisjonen ved å trykke på knapp A, C og E samtidig i 8 sekunder til du hører 1 pip

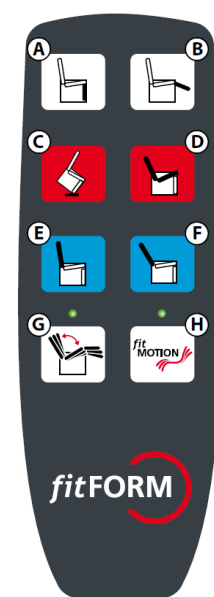


## 5. Fullstendig funksjonsfeil

**Dette er når stolen ikke fungerer i det hele tatt. Følg disse trinnene:**

1. Kontroller alle kabler og strømforsyning, bytt om nødvendig
2. Sjekk håndkontrollkabelen for synlige skader, bytt håndkontroll hvis nødvendig  
Kontroller lyset på kontrollboksen. Denne skal være grønn når stolen ikke brukes og gul når stolen brukes. Når denne er gul uten å bli betjent, er systemet defekt. Du bør bytte ut selve kontrollboksen eller håndkontrollen. Etter å ha byttet kontrollboksen eller håndkontrollen:

### 1. Følg prosedyren "tilbakestille systemet"


- a. Trykk på knappen A til aktuatoren slutter å bevege seg
  - b. Trykk på knappen D til aktuatoren slutter å bevege seg (når den stopper i nøytral stilling, trykk deretter på igjen til setet + ryggstøtten er helt vippet bakover)
  - c. Trykk på knappen F til aktuatoren slutter å bevege seg
  - d. Trykk på alle knappene til stolen er i nøytral posisjon (null) (øvre, midtre og understell er nøyaktig lukket, ryggstøtten er rett opp, benstøtten er helt i, stolen er ikke i heving og heller ikke i tiltposisjon). Lagre denne nøytrale (null) posisjonen ved å trykke på knapp A, C og E samtidig i 8 sekunder til du hører 1 pip
2. Når stolen går inn i " feil " igjen etter å ha fulgt prosedyren " tilbakestilling av systemet " når du trykker på en spesifikk knapp (for eksempel at benstøtten ikke kommer ut), er det aktuatoren som er defekt (i dette tilfellet benstøtteaktuatoren). Bytt denne aktuatoren komplett med kabel  
Etter dette følger du trinn 4 " tilbakestilling av systemet " igjen
  3. Hvis stolen fremdeles ikke fungerer som den skal, kan det også være andre (mindre sannsynlige) årsaker til det " Feil " som: ødelagt splitterboks, ødelagt vibrasjonsenhet, ødelagt setebryter eller defekt kontrollboks. Vennligst sjekk disse og bytt om nødvendig. Vi anbefaler at du alltid følger trinn 4 " tilbakestilling av systemet " etter at du har byttet elektroniske deler
  4. Når det ser ut til at all elektronikkmaskinvare er i orden og stolen fremdeles ikke fungerer, kan du prøve å installere programvaren igjen ved å bruke Linak programmeringsenhet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at dette skaper en fullstendig funksjonsfeil

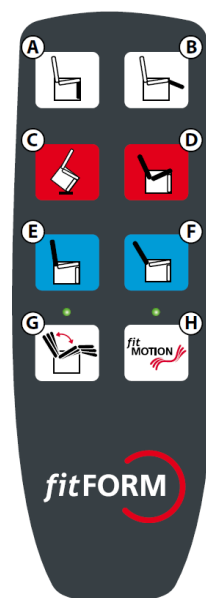






## 6. Programmering av fitMotion-programvare med Linak-programmeringsenheten

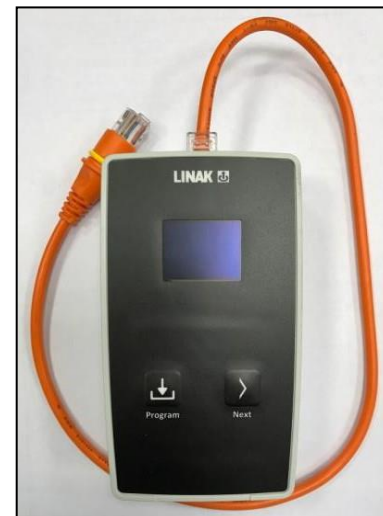- Koble stolens strømboks fra strømmettet
- Fjern pluggen på splitteren fra "HB" -porten på bryterboksen. (Bunnport) (Dette vil trolig kreve å fjerne sikkerhetsbraketten fra kontrollboksen først med en flat skrutrekker.)
- Sett pluggen til Linak-programmeringsenheten inn i "HB" -porten på kontrollboksen. (Så ikke i splitteren, men i selve kontrollboksen)



- Press  denne knappen flere ganger, innt dette vises i display:
- Press  til program
- Press  knappen, nå lastes ny software inn i Kontrollboksen

### Vent til nedlastingen er fullført

- Fjern pluggen til Linak-programmeringsenheten fra "HB" -porten på kontrollboksen.
- Sett pluggen på splitteren tilbake i "HB" -porten på kontrollboksen.
- Sett kontrollboksen tilbake i kontakten.
- La alle tre motorene gå til endeosisjon med håndkontroll. Sannsynligvis piper motorene til en endebryter er nådd. Fitmotion-stolen skal nå fungere ordentlig igjen. (Sjekk om Fitmotion-funksjonen på håndkontrollen kan slås på / av, og om sakte film fungerer.)