



# Tovertafel 2 – «quick-guide»

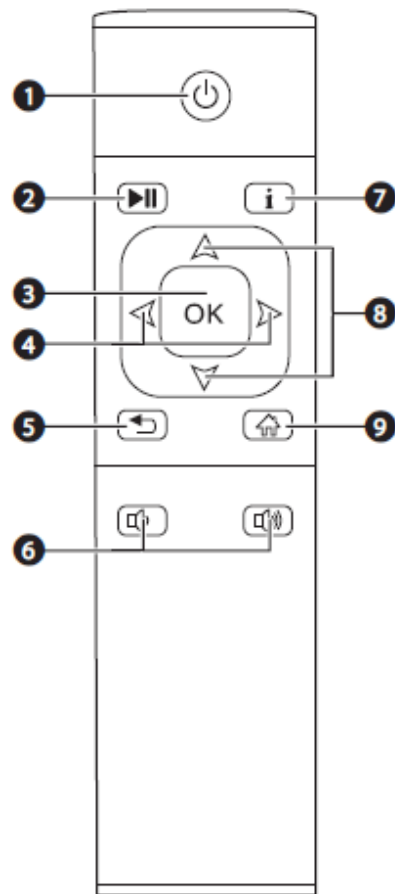

medemagruppen

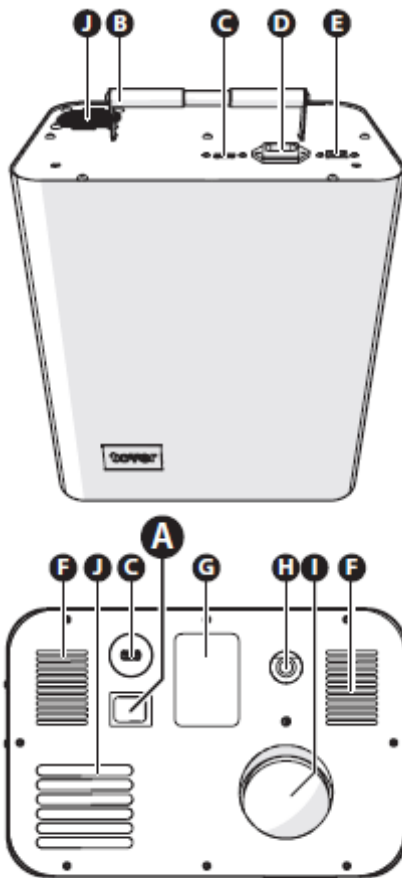

- A) Hovedstrømbryter
- B) Opphengbøyle/bærehåndtak
- C) USB kontakt (1 på overside, 1 på underside)
- D) Strømkontakt
- E) Ethernet port for kablet nettverk
- F) Høytalere
- G) IR mottager og LED indikator
- H) Kamerasensor
- I) Prosjektorlinse
- J) Ventilatorgitter

- 1) På/Av bryter – Starte Tovertafel eller sette den i hvilemodus (dette forutsetter at hovedstrømbryter er på)
- 2) Pause knapp – pause og gjenstarte et spill
- 3) OK knapp – bekrefte et valg
- 4) Navigasjon høyre/venstre – navigere gjennom menyen eller spillene
- 5) Tilbake knapp – returner til forrige bilde
- 6) Volumknapper – øke eller redusere volum
- 7) Informasjon knapp – ekstra informasjon hvis tilgjengelig
- 8) Navigasjon opp/ned – navigere gjennom menyen eller spillene
- 9) Hjem knapp – returnere til hovedmeny eller lagre endringer

## LED indikator:

Rødt konstant lys:	Tovertafel i hvilemodus, klar til å startes	Grønt blinkende lys:	Tovertafel starter opp
Rødt blinkende lys:	Tovertafel slukkes ned	Blått blink:	En knapp på fjernkontrollen trykkes inn
Grønt konstant lys:	Tovertafel er på		



## Starte Tovertafel

1. Sjekk om LED indikator G) lyser rødt, hvis ikke skru på hovedstrømbryter A)
2. Trykk en gang på På/Av bryteren på fjernkontrollen 1) mens den peker mot Tovertafel.
  - LED indikatoren vil begynne å blinke grønn, og etter ca. 20 sekunder kommer et BIP som bekrefter at Tovertafel starter opp. Den vil trenge ca. 2 minutter på å varmes opp for bruk. Når LED indikatoren lyser konstant grønn vil projiseringen på bordet komme og Tovertafel er klar til bruk.
3. Tovertafel vil starte i et tilfeldig spill, trykk på Hjem knappen 9) for å komme til spill menyen.

## Navigere i menyene

- Du vil finne spill og innstillinger i hovedmenyen. Tovertafel betjenes fullt ut med fjernkontrollen som følger med. Bruk piltastene 4) og 8) for å navigere i menyene, og bekreft ønsket valg med OK tasten 3).

## Starte et spill

- For å velge et spill og starte det gjør du følgende, hvis nødvendig trykk Hjem tasten for å returnere til hovedmeny:
  1. Naviger til spillemenyen, bruk piltaster for å flytte mellom menyer.
  2. Velg aktuelt spill med piltaster og trykk OK. Spillet starter nå opp umiddelbart.

## Korrekt funksjon på Tovertafel

- Ved installering skal Tovertafel være justert i forhold til spilleflate (bordet størrelse), bordet farge (lyst eller mørkt), og sensorer skal være kalibrert.

- Opplever du at Tovertafel ikke fungerer optimalt, se følgende punkter:

Deler av spillet projiserer utenfor bordet

- Spilleflaten må justeres til bordflaten eller bordet er flyttet etter installasjon. For justering av spilleflaten, se medfølgende bruksanvisning.

Tovertafel responderer ikke korrekt i forhold til håndbevegelser.

- Bevegelsessensoren må kalibreres eller det er stilt inn feil bordfarge (lys/mørk). Se medfølgende bruksanvisning for kalibrering og justering av bordfarge.

## Skru av Tovertafel

For å sette Tovertafel i hvilemodus gjøre følgende:

1. Trykk en gang på På/Av bryteren mens du peker fjernkontrollen mot enheten. LED indikatoren begynner å blinke rødt. Enheten trenger ca. 2 minutter på å kjøle seg ned.
2. Når Tovertafel har slukket ned vil du høre to BIP og LED indikatoren lyser rødt. Tovertafel er nå i hvilemodus og kan startes opp igjen ved behov.

For å kunne flytte Tovertafel må følgende gjøres i tillegg:

3. Skru av hovedstrømbryteren A).
4. Koble fra strømkabel i strømkontakten D)

**La alltid Tovertafel få kjøle ned til du hører to BIP før hovedstrømbryteren skrues av, dette vil forlenge din Tovertafels levetid.**