



medemagruppen



Bruksanvisning  
- Stellebord Nivano CTX

Gratulerer med valget av Nivano CTX veggmontert stellebord.

## Sikkerhetsinformasjon



**Før bruk av dette produktet må du lese og fullt ut forstå informasjonen i denne brukerveiledningen!**

## Produktinformasjon

CTX høydejusterbare stellebord er beregnet for dusjing og stell av barn og voksne som veier opptil 200 kg. Stellebordet må ikke brukes for andre formål. Denne håndboken viser enheten på 1800 mm lengde med valgfri sidegrind og endevern montert. Utstyret ditt kan være annerledes avhengig av hva som er bestilt.

## Produktbeskrivelse

Det høydejusterbare stellebordet drives av et 24V DC kontrollsystem med batteri back-up. Batteriet muliggjør bruk av stellebordet i tilfelle strømbrytning. Det er viktig at strømmettet er slått på hele tiden for å opprettholde ladningen av reservebatteriene.


## Merkeskilt

Produktets typeskilt viser nødvendig teknisk informasjon:

Model: CTX		
Lift range: 700 mm		
SWL 200 Kg		
230V ~ 50Hz 650W		
IP X4		
	<b>Pb</b>	
Made in England by: Astor Bannerman (Medical) Limited 111 Coin Park industrial estate Andoversford GL54 4HJ		
		LD37

## Tekniske data

Spenning og effekt inn:	230V AC / 50 Hz, 650W maks.
Spenning og strøm ut:	30V DC, 6A maks.
Driftssyklus:	10% maks., 2 minutter bruk/ 18 minutter hvile
Kapsling:	IP X4
Egenvekt:	Ca. 70 kg
Maks. brukervekt:	200 kg
Støynivå:	<70dB(A)

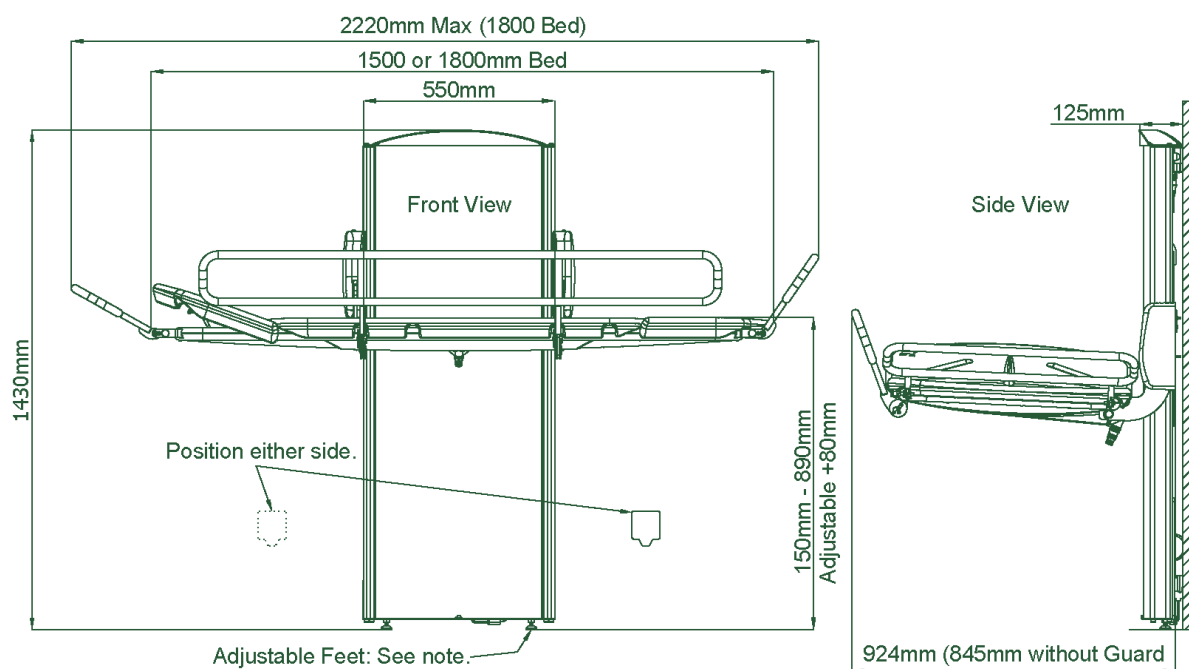

## Bruksanvisning

### Utfør følgende kontroller daglig før du bruker stellebordet:

- Kontroller klientens vekt og kontroller at utstyret er vurdert for vekten som skal løftes.
- Kontroller at strømmettet er tilkoblet og slått på.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer eller gjenstander som kan bli fanget når stellebordet brukes.
- Kontroller at stellebordet vil heve og senke med håndsettet.


### Gjør stellebordet klart til bruk (fig1):

Stellebordet holdes i oppfelt posisjon av gassfjærer.

Det er ingen utløsermekanisme for bruk før stelleplaten felles ut.

Slik flytter du stellplaten fra oppfelt posisjon:

- Legg hånden på stelleplatens overkant.
- Trekk forsiktig fremover, og stelleplaten begynner å rotere nedover.
- Under rotasjonen vil stelleplaten få litt fart, så legg hånden under for å hjelpe den å senke sakte ned.

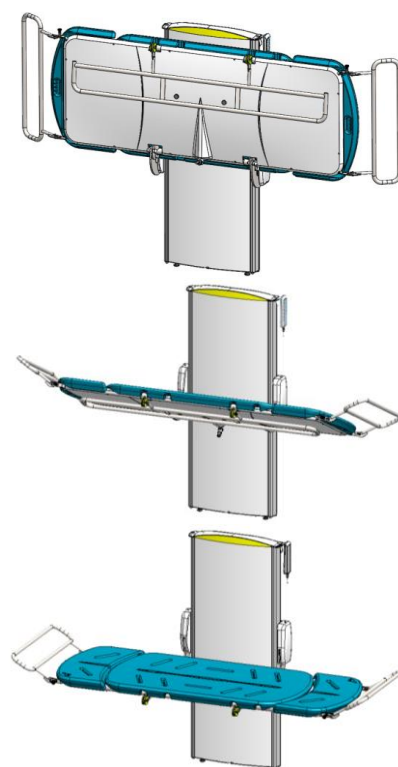

### Justere høyden på stellebordet og bruk av lyset (fig2):

Stellebordet betjenes med håndsettet kontroll.

- Hvis du trykker på en av de øverste knappene, vil du enten heve eller senke stellebordet til ønsket høyde (pil opp og pil ned)).
- Trykk på lys -knappen for å slå det innebygde lyset på toppen av stellebordet på /av.
- Bruk knappene heve/senke for å plassere bordet i den mest passende høyden for å overføre klienten. Juster deretter høyden igjen for bruk med klienten plassert på stelleplaten.



### Bruk av side- og endegrinder:



Avhengig av spesifikasjonen, kan stellebordet ha en sidegrind og to endegrinder.

Slik feller du opp sidegrinden (fig. 3):

- Nå under platen og ta tak i grinden som holdes på plass med magneter.
- Trekk ned grinden slik at den roterer ned. Pass på at du ikke slipper taket, da det kan svinge rundt av seg selv.
- Drei grinden fremover og opp på plass.
- Når den er reist opp, vil grinden falle ned og låse seg på plass.

For å felle ned sidegrinden:

- Løft opp grinden til den kan roteres tilbake mot deg.
- Roter rinden ned og tilbake under stelleplaten.
- Skyv grinden opp under platen til magnetene holder den.

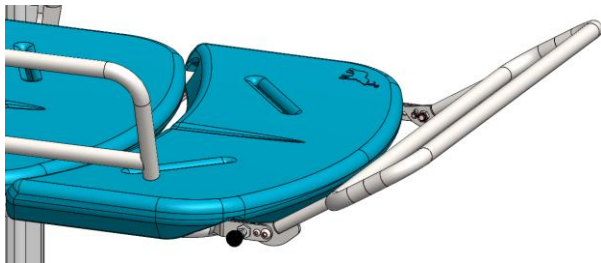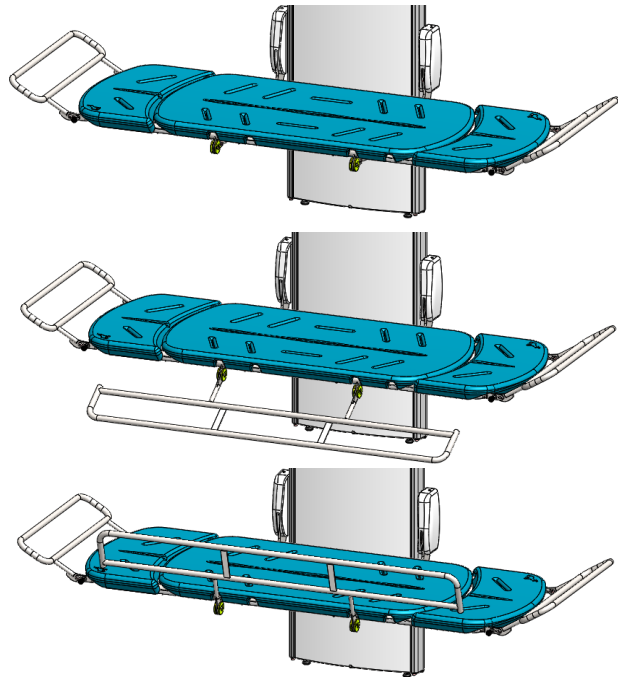

Slik betjener du endegrinder (fig. 4):


- Trekk i den svarte låsepinnen for å frigjøre beskyttelsen.
- Vri grinden til alternativ stilling (hevet eller senket).
- Slipp låsepinnen for å låse beskyttelsen på plass.

### Bruk av hodestøttene:

Avhengig av spesifikasjonen, kan stellebordet ha en eller to hodestøtter montert. Vær oppmerksom på at hodestøtten bare har støttestang i den ene enden, som settes i ønsket posisjon under bruk.

### Slik justerer du hodestøtten(e) (fig. 5):

- Dette bør gjøres før klienten plasseres på stellplaten.
- Nå under nakkestøtten og løft opp, den roterer oppover.
- Når den løftes, vil støttestangen falle ned.
- Sørg for at støttestangen er godt låst på plass før bruk.
- For å senke hodestøtten, reverserer du prosedyren. Hvis hodestøtten ikke er nødvendig mens stellebordet er i bruk, bør klienten sitte fremoverbøyd mens den senkes.

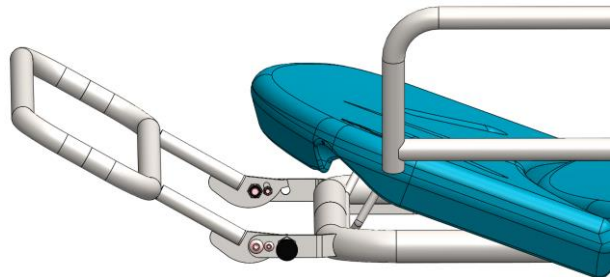

## Rengjøring og vedlikehold

### **Forsiktighet:**

Hyppig bruk av oljebaserte produkter kan påvirke stalleflatematerialet negativt. Oljer og andre petrokjemiske produkter bør unngås og eventuelle rester fjernes umiddelbart. Disse produktene inkluderer blant annet: Babyolje og mykgjørende kremer.

### Rengjøring:

Før rengjøring, prøv en liten test først i et lite synlig område med rengjøringsmidlet du har til hensikt å bruke.

Stellebordet kan rengjøres med de fleste milde rengjøringsmidler eller med en løsning med varmt såpevann. Stellebordet bør skylles av etter rengjøring og tørkes av med en myk klut.

Kjemiske midler, slipemidler og løsemidler må ikke brukes, dvs. avløpsrensere, aceton, ovnsrensere eller syrer.

Vær alltid oppmerksom på instruksjonsetiketter for rengjøringsmiddelet.

Ved behov av desinfisering skal det benyttes et klorbasert desinfeksjonsmiddel, eks. Virkon 15.

Spritbaserte desinfeksjonsmidler må ikke benyttes da de kan tørke ut plastmaterialer.

### Vedlikehold:

Etterse produktet jevnlig og sjekk at det ikke er noen skader eller løse deler.

Et skadet produkt skal umiddelbart tas ut av bruk og repareres av fagkyndig personell. Kontakt din leverandør.

Ethvert forsøk på ukyndig reparasjon eller modifikasjon medfører bortfall av garantiansvar.

*Med forbehold om produktendringer*

Dette produktet importeres og omsettes av:

**Medema Norge AS**

**Postboks 133**

**1483 Skytta**

**Telefon: 67 06 49 00**

**Telefaks: 67 06 49 90**

**e-post: [firmapost@medema.no](mailto:firmapost@medema.no)**

**Web: [www.medema.no](http://www.medema.no)**

*Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.*