



medemagruppen

# medemagruppen

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic3 løfte- og hvilestol



# Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic3 løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Balanseproblemer, stort behov for posisjonering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)</li> <li>• Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt</li> <li>• ILPM/ILPM Extra tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)</li> <li>• Elektrisk regulering av ryggoverdel samt elektrisk regulerbar korsryggstøtte</li> <li>• APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.</li> </ul>
Balanseproblemer og kyfose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)</li> <li>• Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt</li> <li>• ILPM eller ILPM Extra tilpasningsrygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)</li> <li>• Nakkepute nr 5 dråpeformet</li> </ul>
Balanseprobleme, mindre behov for posisjonering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)</li> <li>• Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt</li> </ul>
Kyfose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILPM eller ILPM Extra rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)</li> <li>• Nakkepute nr 5 dråpeformet.</li> </ul>
Scoliose / feilstillinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILPM eller ILPM Extra rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)</li> </ul>
Trykksår sete (EPUAP grade 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) med Uniform eller Sarcotex trekk (forbyggende pute)</li> <li>• APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering med Uniform eller Sarcotex trekk</li> <li>• Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem</li> <li>• Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning.</li> </ul>
Risiko for trykksår sete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel)</li> <li>• APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering</li> <li>• Trykkavlastende sittepute med minneskum</li> <li>• Uniform eller Sarcotex trekk</li> <li>• Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem</li> <li>• Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning</li> </ul>
Risiko for trykksår rygg (nedre del)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rygg med lag av minneskum (tilpasning)</li> <li>• ILPM/multitilpasningsrygg med sidestøtte.</li> </ul>
Risiko for trykksår på ben / legger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benstøtte med ekstra minneskum (tilpasning)</li> </ul>
Risiko for trykksår på underarmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armlener med ekstra minneskum (tilpasning)</li> </ul>
Ingen eller liten håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stolen kan klargjøres med spesialelektronik for f.eks øyestyring eller andre former for lett betjente håndkontroller. Be om mer informasjon</li> </ul>
Inkontinens og risiko for trykksår	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkontinenstrekk evt Sarcotex trekk</li> <li>• Trykkavlastende puter i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex trekk</li> </ul>
Store personer med høy brukervekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setebredde 57cm med max brukervekt 175kg (std størrelse)</li> <li>• Setebredde 63cm med max brukervekt 250kg (std størrelse)</li> <li>• Spesialbestilt stol med setebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brukervekt)</li> </ul>
Lange personer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra dyp stol sd49-59cm (sb51) (stol har tilstrekkelig setehøyde justering sh40-60cm)</li> <li>• Ombyggingsett ekstra setedybde med sd 49-59cm (øvrig setebredder)</li> <li>• Alternativ rygg med høyere rygghøyde 94 eller 104cm</li> <li>• Benstøtteforlenger (+8cm)</li> </ul>

# Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic3 løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Små/korte personer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stol med ryghøyde 72cm</li> <li>Ekstra lav setehøyde 36, 37, 38 ,39cm (ved bruk av ekstra lav setepute med Intelligel)</li> <li>Ekstra kort setedybde fra 38cm (Rygg med 2 alt 6cm tykkere polstring) Kortere setedybder som spesialtilpasning ned til 25cm på forespørsel</li> <li>Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)</li> </ul>
Smale/tynne personer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stol med setebredde 45 (viktig med riktig setebredde) ILPM rygg som fikserer hoften ved bruk av justerbare ryggputer.</li> </ul>
Mentalt nedsatt (alzheimer, parkinson)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smart-kontroll med sammenkoblede elfunksjoner og kun 2 knapper på hånd- kontroll.</li> </ul>
Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakkepute med meget mykt fyll</li> <li>Elektrisk regulering av ryggoverdel</li> </ul>
Behov for bredere armlener , problem med at armene faller ned	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bredere armlener (+ 2-4-6cm innover eller utover) (tilpasning)</li> </ul>
Behov for å bli kjørt i stolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hjulsett Vario komplett (automatisk bremsefunksjon)</li> </ul>
Behov for varme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varme i sete og rygg</li> </ul>
Behov for å arbeide, lese eller spise i stolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulike bordløsninger</li> </ul>
Behov for mer/bedre støtte for ben / heler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benstøtteforlenger</li> <li>Sammenhengenede trekk for sete og benstøtte</li> <li>Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med minneskum eller latex)</li> </ul>
Dårlig håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trådløs IR løsning betjent med lettbetjent håndkontroll eller øyestyring Tobii</li> <li>Elektrisk betjent svingfunksjon. Ulike spesialstyringer (be om info).</li> </ul>
Stiv hofte / problem med å bøye hofte / kne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coxittsete</li> </ul>
Risiko strømbrydd og for å snuble i kabler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteri back up</li> </ul>
Ønske om myk sittekomfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setepute ekstra myk (latex)</li> <li>Ekstra myk rygg eller ILPM rygg (vår mykeste rygg)</li> </ul>
Ønske om korrekt korsryggstøtte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulerbar korsryggstøtte , manuell (std) eller elektrisk betjent.</li> </ul>
Ekstra følsom hud på sete og lår	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setepute ekstra myk (latex)</li> </ul>
Ekstra følsom hud på armer/albuer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Armlen trukket med latex</li> <li>Trekk med skinn</li> </ul>
Ekstra følsom hud på rygg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rygg ekstra myk eller tilpasning med ekstra latexlag på rygg</li> </ul>
Ekstra følsom hud på legger og knehase	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sammenhengende trekk på sete og benstøtte. Ekstra lag med latex på benstøtte</li> </ul>
Forflytning til/fra rullestol, sideveis forflytning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sidevanger oppfellbare, manuelt betjent, alt el-betjent</li> </ul>
Problemer med å betjene svingfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrisk betjent svingfunksjon, kan også kombineres med øyestyring Tobii</li> </ul>
Ryggproblemer, smerter i korsrygg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulerbar korsryggstøtte, manuell (std)eller elektrisk betjent</li> </ul>



**medemagruppen**