



medemagruppen



Renett Air
- bidètilsats

Ett unikt vaskesystem som setter en ny standard for bidètilsatser!



Renett Air er utviklet i Skandinavia for skandinaviske forhold og behov, basert på over 30 års erfaring med bidètilsatser!

Med **Renett Air** møter vi de behov våre brukere har for å være mer selvstendig i intimsituasjoner, uten å gjøre store inngrep i baderommet.

Monteres direkte på eksisterende toalett

Med et innovativt design gir **Renett Air** helt nye muligheter. Den kompakte bidètilsatsen smelter naturlig inn i baderommets miljø, og gjør deg helt ren med et knappetrykk.

Hva betyr det?

Renett Airs konstruksjon unnviker enhver form for påvirkning av baderommets membran, og veggen kan holdes helt fri uten noen veggmontering. Alle funksjoner finnes i tilsatsen, en kompakt termostatarmatur, en effektiv og stillegående varmluftsvifte, samt en brukervennlig håndkontroll.

Lett og enkel å installere

Da **Renett Air** er en helintegrert bidètilsats blir installasjonen enkel med færre slanger og rørføringer. **Renett Air** har et sete uten smussfeller og med en integrert sprutskjerm. Bidètilsatsen er også konstruert for å stabilisere hele enheten og for å unngå skader ved uaktsom bruk.

Anvendelig

Renett Air har en smart konstruksjon som ikke bare gjør den kompakt, den passer også de aller fleste toaletter av nordisk modell. Dessuten leveres den med ett utskiftbart lokk som i likhet med setedelen er enkelt å skifte ut. Alle komponenter kan smidig skiftes ut, noe som gir en lang livssyklus til en lavere kostnad. Da **Renett Air** kun monteres på porselenet blir også tilbakeføringen etter endt behov enkel og kostnadseffektiv.

Hvordan fungerer Renett Air ved bruk?

Doble spyledyser gir en betydelig forbedret rengjøring, hvilket medfører at bidètilsatsen kan benyttes av alle uansett forutsetning.

Med Renett Air kan du velge mellom individuell styring, eller helautomatisk program. Ved individuell innstilling kan Renett Air valgfritt benyttes med en eller to spyledyser (rektal eller feminin vask), samt med eller uten tørkefunksjon.

Alle betjeninger er lett tilgjengelige, og den leveres med en tydelig håndkontroll som kan tilpasses etter brukerens behov og kognitive nivå.

Vaskeprosessen innledes med en skånsom spylevask med temperert vann via den bakre vertikale (rektal), og den fremre horisontale (feminin) spyledysen.

Forspyling for å sikre temperert vann kan brukeren selv styre, eller benytte det helautomatiske programmet.

Vanntrykk og vanntemperatur justeres enkelt på siden av setet.

Den fremre vaskedysen gir spesielt kvinner rett forutsetning da vannstrålen spyle bakover slik at urinveisinfeksjoner kan unngås.

Etter rengjøring følger en behagelig varmlufttørk med den effektive og stillegående viften.

Renett Air har også en diskret nattbelysning som guider brukeren i mørket.

Produktfakta:

Nettspenning:	230 VAC
Driftsspenning bidé:	48 VDC
Strømkabellengde:	48V = 3 meter / 230V = 2 meter
Kapslingsklasser bidé/trafo:	IP24 / IP68
Vanntemperatur:	*/** justerbar, maks 38 °C
Setevakt:	Mikrobryter
Vannmengde:	Maks 11 L/minutt
Effektforbruk:	Maks 750W
Egenvekt netto:	10 kg
Maks brukervekt:	200 kg

**) Gjelder ved innkommende vanntemperatur VV 60 °C / KV 12 °C.*

****) Ved avvikende temperatur, se manual for termostatblander*

Til Renett Air kan det leveres ulike tilbehør for individuell tilpassing av produktet. Eksempelvis kan standard håndkontroll byttes ut med håndkontroll for kun rektal vask, håndkontroll for kun automatisk vaskesyklus eller fotbryter for automatisk vaskesyklus. Videre finnes det armlen som monteres direkte på bidètilsatsen, enten som par (H og V) eller som en side valgfritt H eller V. Til armlenene finnes det også toalettrull holder og fester for håndkontroll. Renett Air kan også utstyres med et myksete for økt sittekomfort.

Eksempler på tilbehør:



4403-1000, Fotpedal Renett Air Automatic



4405-1108, Håndkontroll Renett Air 3-knapper (ikke feminin vask)



4405-1109, Håndkontroll Renett Air Automatic



4406-1025, Toalettpapirholder Renett Air armlen



4406-1026, Håndkontrollholder Renett Air armlen H
4406-1027, Håndkontrollholder Renett Air armlen V (avbildet)
4406-1028, Håndkontrollholder Renett Air armlen universal




4407-1025, Myksete Renett Air

Bestillingsdata Renett Air

HMS art.nr.:	Varenr.:	Varebetegnelse:
297421	4400-1106	Toaletttilsats Renett Air
297463	4407-1025	Myksete Renett Air
297426	4413-1008	Armlen Renett Air, par
297427	4413-1010	Armlen Renett Air H
297428	4413-1009	Armlen Renett Air V
297479	4406-1025	Toalettpapirholder Renett Air armlen
297449	4406-1026	Håndkontrollholder Renett Air armlen H
297450	4406-1027	Håndkontrollholder Renett Air armlen V
297451	4406-1028	Håndkontrollholder Renett Air armlen universal
297485	4431-1023	Veggfeste håndkontroll Renett Air
297468	4431-1022	Selvklebende folie veggfeste Renett Air
297446	4405-1108	Håndkontroll Renett Air 3-knapper
297447	4405-1109	Håndkontroll Renett Air Automatic
297440	4403-1000	Fotpedal Renett Air Automatic




Målskisse

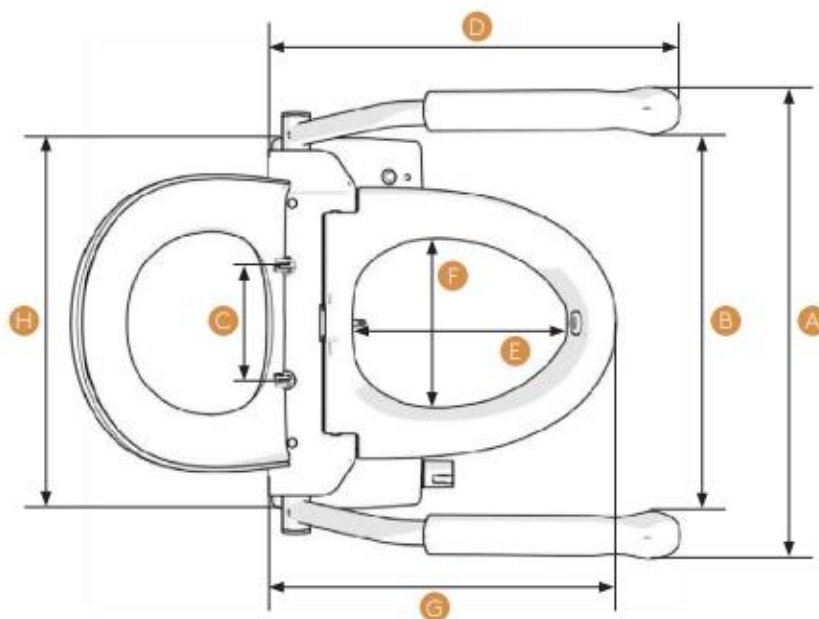


Sett ovenfra

A	62 cm
B	50 cm
C	13-17 cm
D	53 cm
E	28 cm
F	23 cm
G	46 cm
H	56 cm

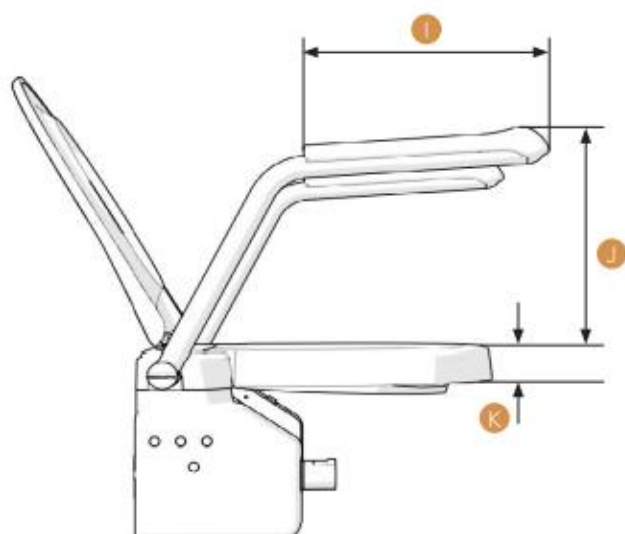

Sett fra siden

I	30 cm
J	28 cm
K	5 cm

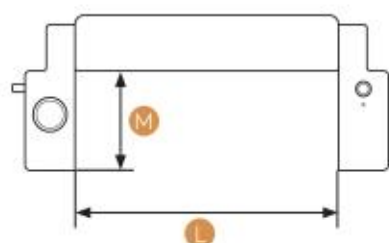

Sett forfra

L	40 cm
M	20 cm

Obs. Enheten kan «forskyves» ca. 2 cm sideveis.



Medema Norge AS

Din leverandør av funksjonelle løsninger for baderom

www.medema.no