



medemagruppen

**Fot- / hånd- / albuebetjening av nedskylling
for toaletter JHC4000+ Gulv og Vegg (m/sisterne)**



HMS nr.:	Varenummer:	Varebeskrivelse:
298365	4405-1136	Fot-/håndflate-/albuebetjening av nedskylling JHC4000+ systerne

Gummibelg for pneumatisk aktivering av nedskylling på toalettene JHC4000+ Gulv og JHC4000+ Vegg (toaletter med utenpåliggende systerne) med 2 meter slange.

Monteringsanvisning:

1. Løft av toppdeksel på sisternen for tilgang til flottører
2. Koble fra slangen til den lille skylleknappen
3. Legg eller fest gummibelgen på egnet sted inntil 2 meter fra flottøren. Bruk dobbeltsidig tape hvis den skal festes på en overflate
4. Før slangen til gummibelgen inn i sisternen på egent sted (det må eventuelt bores et hull i sideramme til systerne)
5. Koble slangen til flottøren og juster flottøren for liten skylling til maksimalt skyll
6. Test funksjon før du setter på toppdeksel igjen
7. Informer bruker om at den lille knappen er koblet fra, og at stor knapp og gummibelg begge gir maksimal nedskylling

Med dette tilbehøret kan man nå enkelt skylle ned toalettet før vaske og tørkeprosessen startes, eller hvis man har utfordringer med å betjene trykknappene på sisternen etter endt toalettbesøk.