



medemagruppen



Reservedele / Spare parts MC 1124 Child

MC 1124 Child

Indholdsfortegnelse

Undervogn, skærme og power modul	4
Affjedring og svinghjul	6
Centerhjul	8
Motor	10
Sædemodul MC 1124 - el-hejs og tilt	12
Fenderhjul, sæt MC 1124	14
Spinalus-2 MC 1124 uden puder	16
Spinalus-2 MC 1124 uden puder	18
Fodstøtte aktuator del.....	20
Beslag for fodstøtte	22
Fodstøtte elektrisk barn	24
Fodstøtte manuel barn	26
Fodplade.....	28
Central fodplade, elektrisk barn.....	30
Central fodplade lang, barn, manuel	32
Central fodplade kort, barn, manuel	34
Sving væk joystickholder	36
EI-dele MC 1124	38


MC 1124 Child

Content

Under carriage, covers and power module.....	4
Suspension and pivot wheels	6
Central wheel.....	8
Motor	10
Seat module MC 1124 - electric hoist and tilt	12
Fender wheels, set MC 1124.....	14
Spinalus-2 MC 1124 without cushions.....	16
Spinalus-2 MC 1124 without cushions.....	18
Footrest actuator part.....	20
Bracket for footrest	22
Footrest electric child.....	24
Footrest manual child	26
Foot plate.....	28
Central foot plate, electric child	30
Central foot plate long, child, manual	32
Central foot plate short, child, manual	34
Swing-away joystick mount	36
Electric parts MC 1124	38

MC 1124 Child

Undervogn, skærme og power modul
Under carriage, covers and power module

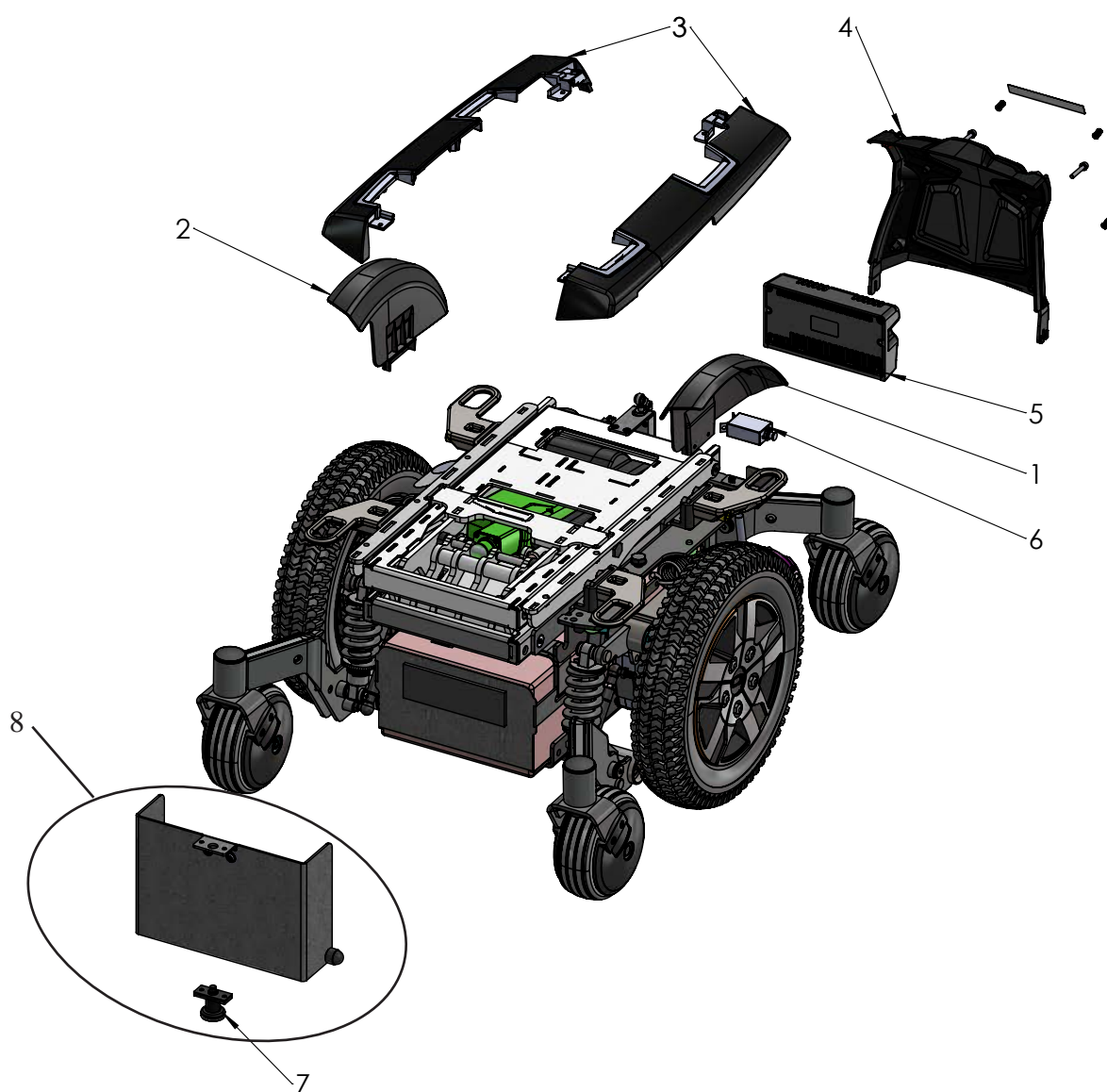

MC 1124 Child

Undervogn, skærme og power modul Under carriage, covers and power module

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2401-1269	Hjulskærm højre MC 1124	Wheel cover, right, MC 1124	1
2	2401-1270	Hjulskærm venstre MC 1124	Wheel cover, left, MC 1124	1
3	2401-1003	Centerskærm MC 1124	Central cover, MC 1124	1
4	2401-1001	Skærm bag, MC 1124	Back cover, MC 1124	1
5	2405-1274	Power modul R-NET 120A	Power module R-NET 120A	1
6	2405-1448	Automat sikring med fly 413-K14-LN2-70A	Thermal fuse w/flight security 413-K14-LN2-70A	1
7	2435-1052	Ganter positionsbolt med flange Ø8x8	Ganter positioning bolt w/flange Ø8x8	1
8	2402-1010	Front klap for batteribakke, MC 1124 komplet	Front cover for batteri tray, MC 1124 complete	1

MC 1124 Child

Affjedring og svinghjul Suspension and pivot wheels





5

4



For / Front

Bag / Back

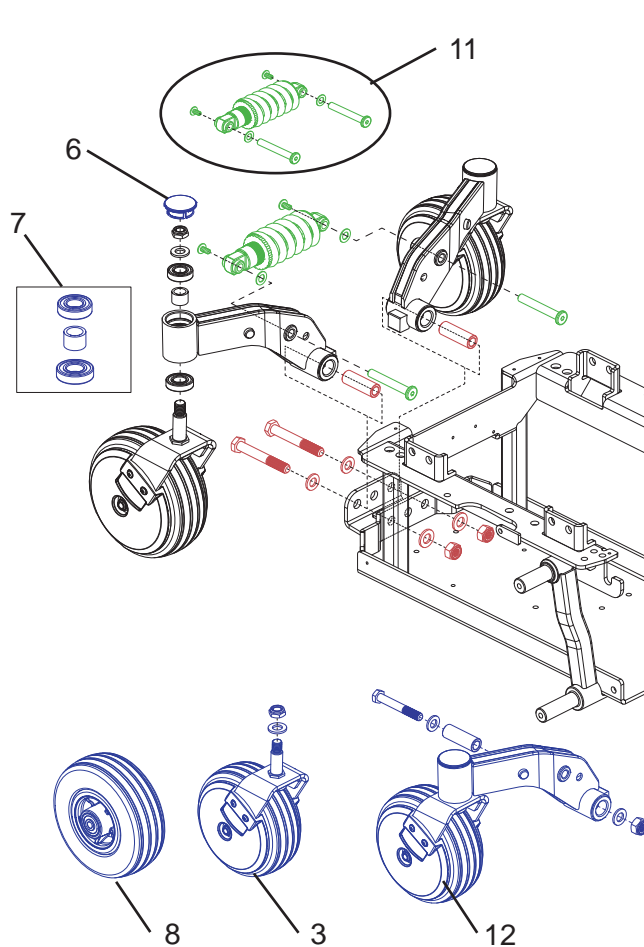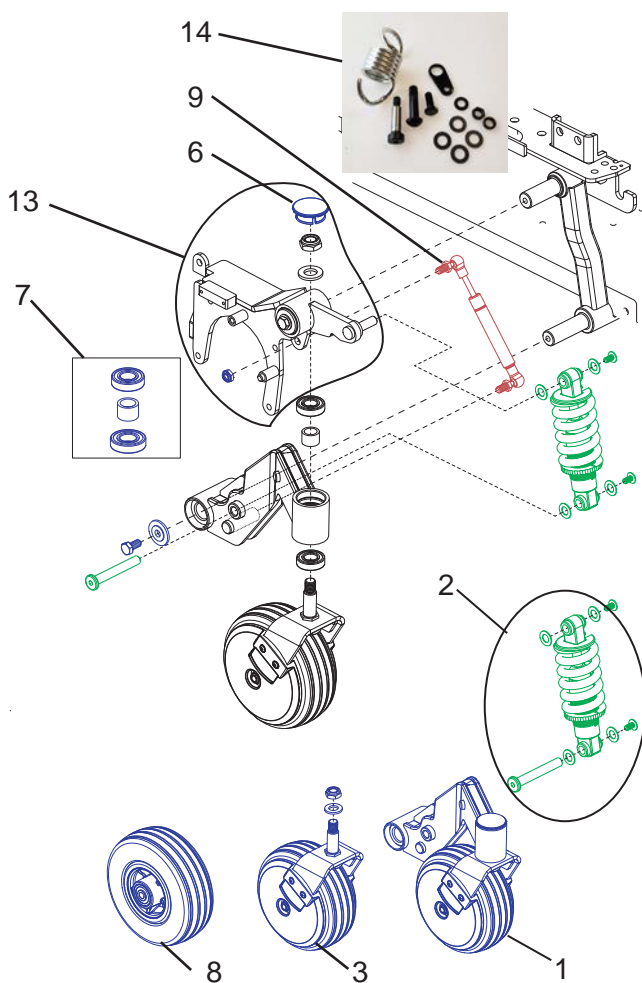


MC 1124 Child

Affjedring og svinghjul Suspension and pivot wheels

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2402-1020	Affjedring, front m/6" svinghjul, højre MC 1124	Suspension front, w/6" wheel, right MC 1124	1
	2402-1021	Affjedring, front m/6" svinghjul, venstre MC 1124	Suspension front, w/6" pivot wheel, left MC 1124	1
2	2406-1632	Fjeder til affjedring, MC 1124	Suspension spring back, MC 1124	1
3	2403-1005	Svinghjul m/gaffel	Pivot wheel w/fork	2
4	2409-1003	Reflekslabel rød 30x50	Reflective label red 30x50	2
5	2409-1004	Reflekslabel hvid 30x50	Reflective label white 30x50	2
6	2435-1053	Topdæksel til affjedring bag	Top cover for suspension back	2
7	2435-1054	Kugleleje til svinghjul MC 1124	Ball bearing for pivot wheel MC 1124	4
8	2403-1004	Svinghjul m/lejer, sort MC 1124	Pivot wheel w/bearings, black MC 1124	4
9	2406-1214	Støddæmper til svinghjul, 1124	Suspension for pivot wheels , 1124	1
10	2435-1028	Bøsning for svinghjulsarm, MC 1124	Bushing for pivotwheels arm, MC1124	2
11	2406-1633	Fjeder bag, incl skruer MC 1124	Suspension spring back, MC 1124	1
12	2402-1174	Svinghjul med arm bag MC 1124 højre	Pivot wheel with caster arm back MC 1124 right	1
	2402-1175	Svinghjul med arm bag MC 1124 venstre	Pivot wheel with caster arm back MC 1124 left	1
13	2404-1495	Motorophæng MC 1124 højre	Engine mount MC 1124 right	1
	2404-1496	Motorophæng MC 1124 venstre	Engine mount MC 1124 left	1
14	2406-1684	Fjeder, motorophæng MC 1124	Spring, engine mount	2

MC 1124 Child

Centerhjul Central wheel

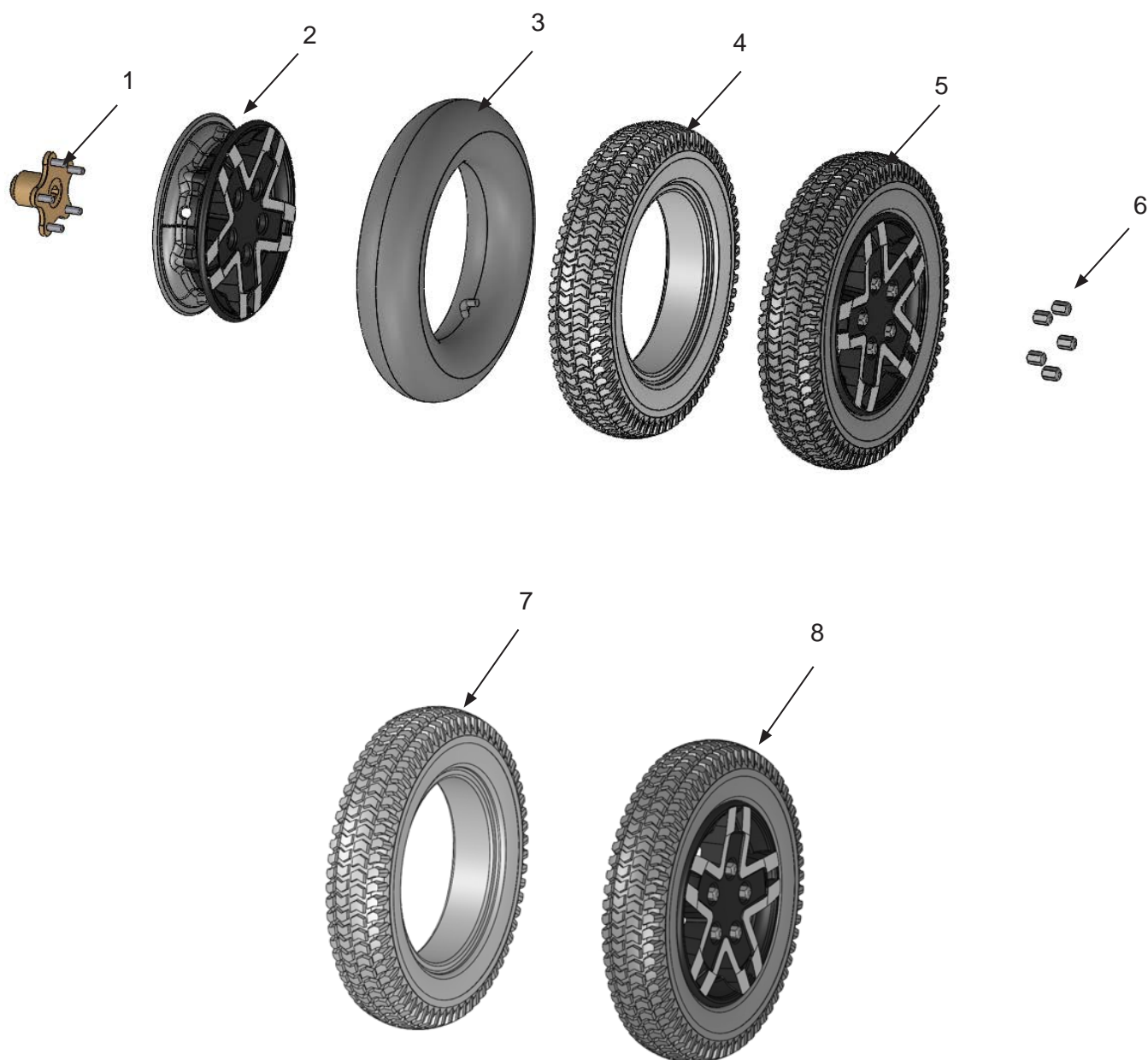


MC 1124 Child

Centerhjul Central wheel

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2406-1634	Flange/nav til drivhjul MC 1124 / MC 1144	Wheel hub for drive wheel, MC 1124 / MC 1144	1
2	2403-1244	Fælg sort for MC 1124/MC 1144	Rim black complete MC 1124 / MC 1144	1
3	2403-1110	Slange til trækjul MC 1124 / MC 1144 (3.00-8)	Central hose MC 1124 / MC 1144 (3.00-8)	1
4	2403-1007	Dæk for drivhjul, sort MC 1124 / MC 1144, luft	Tyre for drive wheel, black MC 1124 / MC 1144, air	1
5	2403-1242	Drivhjul luft, MC 1124/MC 1144, sort	Drive wheel complete, black MC 1124 / MC 1144, air	1
6	2431-1010	Hjulmøtrikker 5 stk., MC 1124 / MC 1144	Wheel nuts, 5 pcs. MC 1124 / MC 1144	1
7	2403-1010	Dæk for drivhjul, sort MC 1124 / MC 1144, massiv	Tyre for drive wheel, black MC 1124 / MC 1144, solid	1
8	2403-1243	Drivhjul massiv, MC 1124/MC 1144, sort	Drive wheel complete, black MC 1124 / MC 1144, solid	1

MC 1124 Child

Motor
Motor

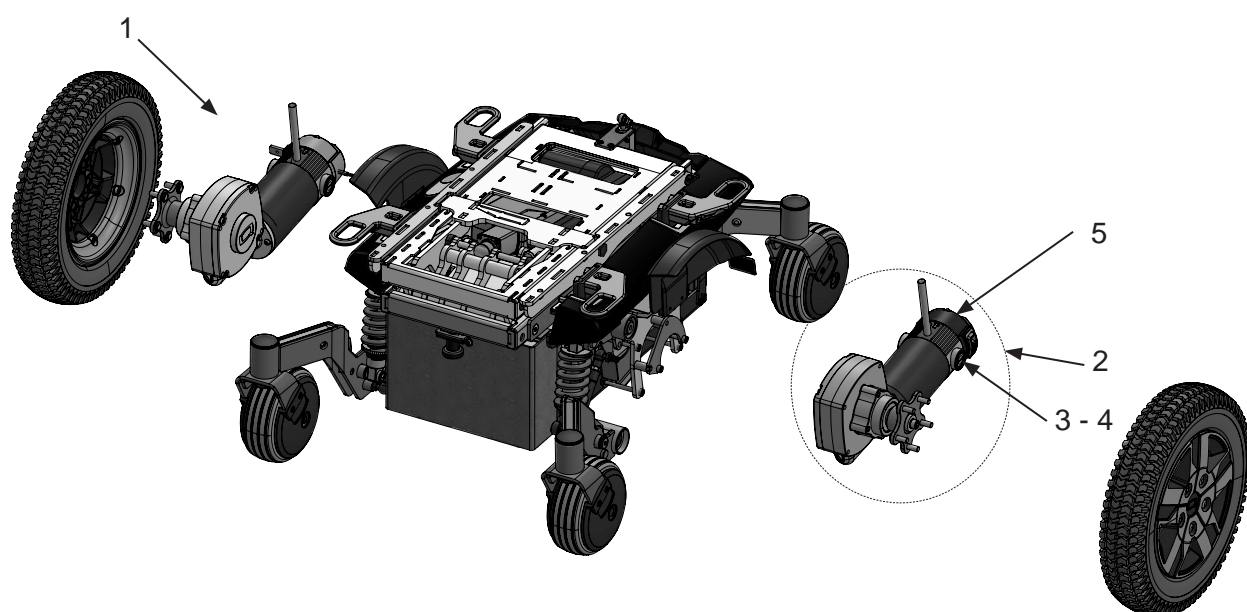


MC 1124 Child

Motor Motor

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2404-1004	Motor/gear, MC 1124, højre	Motor/gear, MC 1124, right	1
2	2404-1005	Motor/gear, MC 1124, venstre	Motor/gear, MC 1124, left	1
3	2404-1010	Kul til motor, MC 1124	Coal for motor MC 1124	8
4	2404-1011	Dæksel for kul, MC 1124	Lid for coal MC 1124	8
5	2404-1499	Magnetbremse, MC1124/1144 højre	Magnetic brake, MC 1124/1144 right	1
	2404-1498	Magnetbremse, MC1124/1144 venstre	Magnetic brake, MC 1124/1144 left	1

MC 1124 Child

Sædemodul MC 1124 - el-hejs og tilt
Seat module MC 1124 - electric hoist and tilt

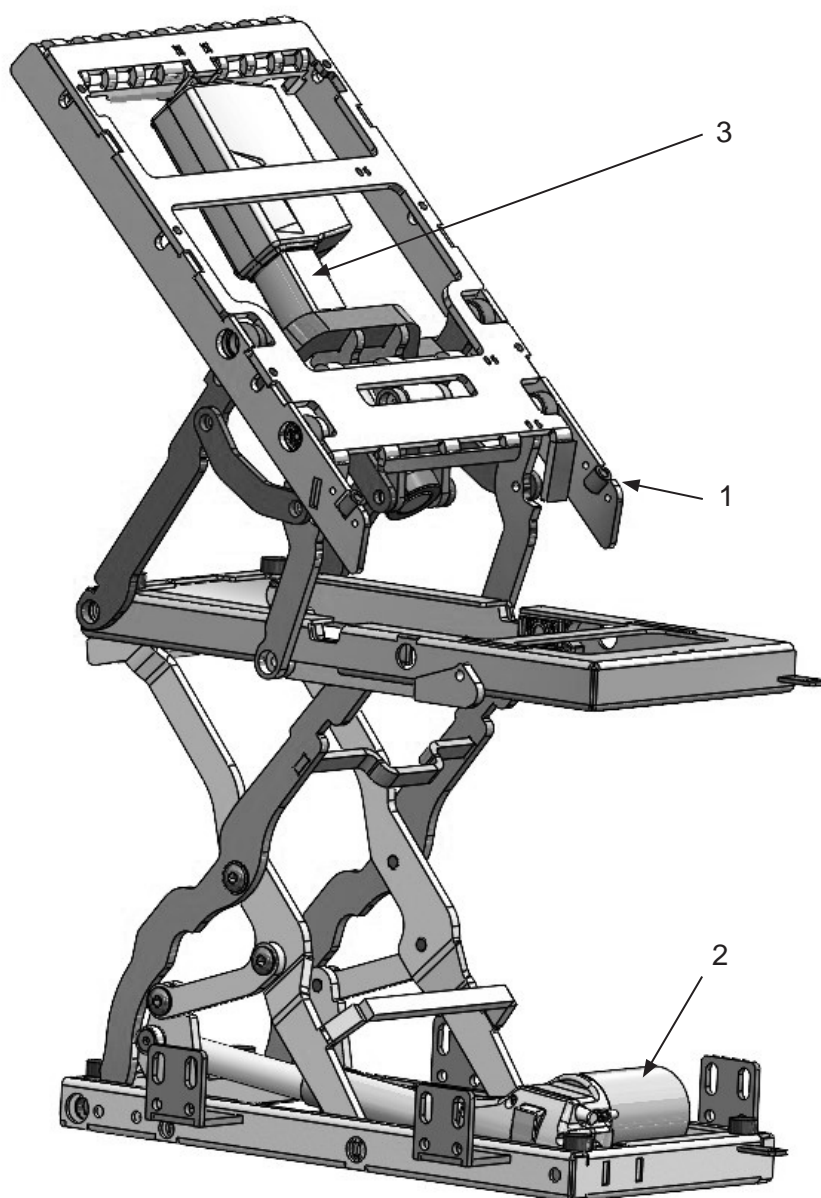


MC 1124 Child

Sædemodul MC 1124 - el-hejs og tilt Seat module MC 1124 - electric hoist and tilt

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1475	Sædemodul, el-hejs og tilt for Spinalus-3	Seat module electric hoist and tilt for Spinalus-2	1
2	2405-1748	Aktuator sædemodul SP3 hejs TA41 117MM 8000N	Hoist actuator for Spinalus-2	1
3	2405-1749	Aktuator sædemodul SP3 tilt TA29 100MM 6000N	Tilt actuator for Spinalus-2	1
	2402-1173	Gummibuffer for hejs og tilt MC1124 / MC1144	Rubber for electric hoist and tilt MC1124 / MC1144	2

MC 1124 Child

Fenderhjul, sæt MC 1124
Fender wheels, set MC 1124

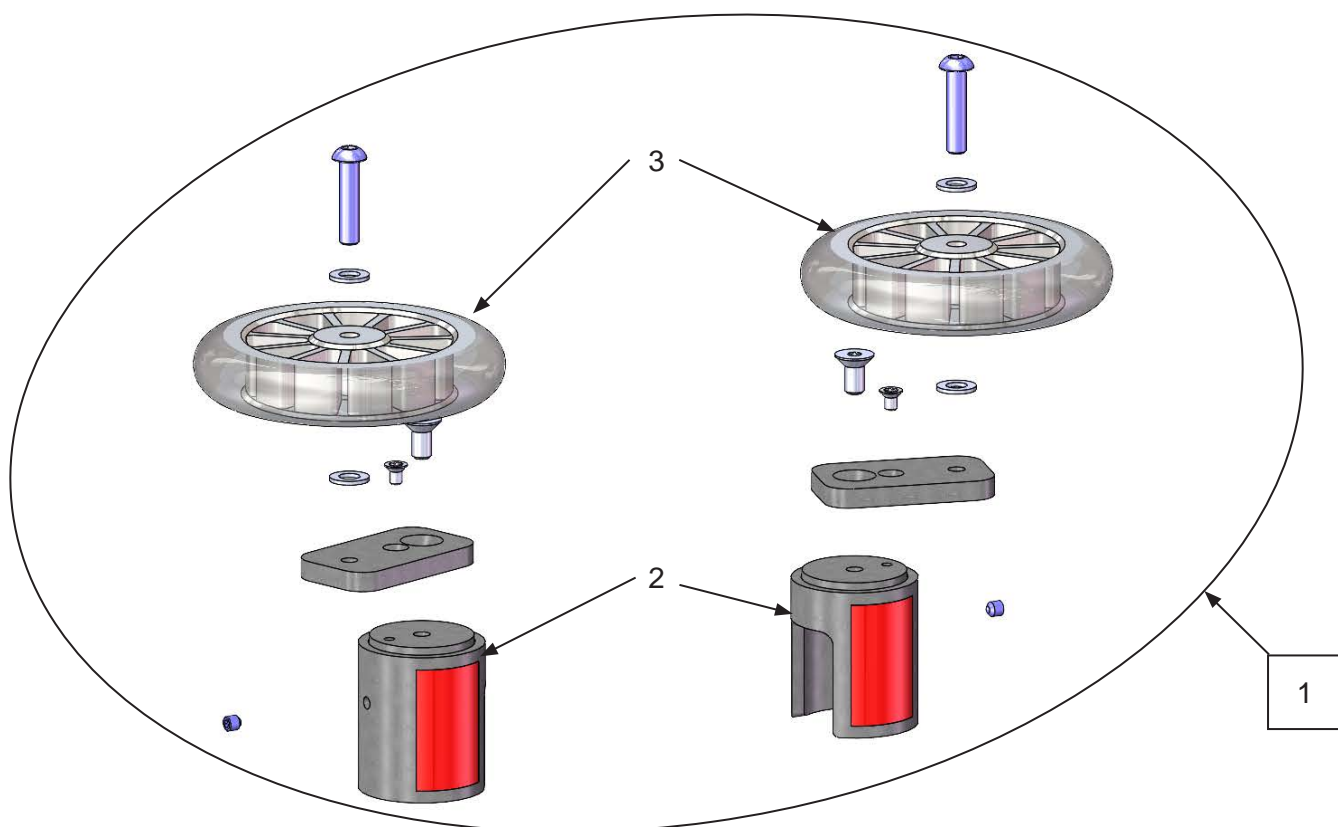


MC 1124 Child

Fenderhjul, sæt MC 1124 Fender wheels, set MC 1124

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2406-1506	Fenderhjul, sæt MC 1124	Fender wheels, set MC1124	1
2	2406-1581	Slidset beslag, fenderhjul, MC 1124	Bracket for fender wheels, MC 1124	2
3	2403-1121	Fenderhjul 125 mm m/klar bane	Fender wheel 125 mm	2

MC 1124 Child

Spinalus-2 MC 1124 uden puder
 Spinalus-2 MC 1124 without cushions

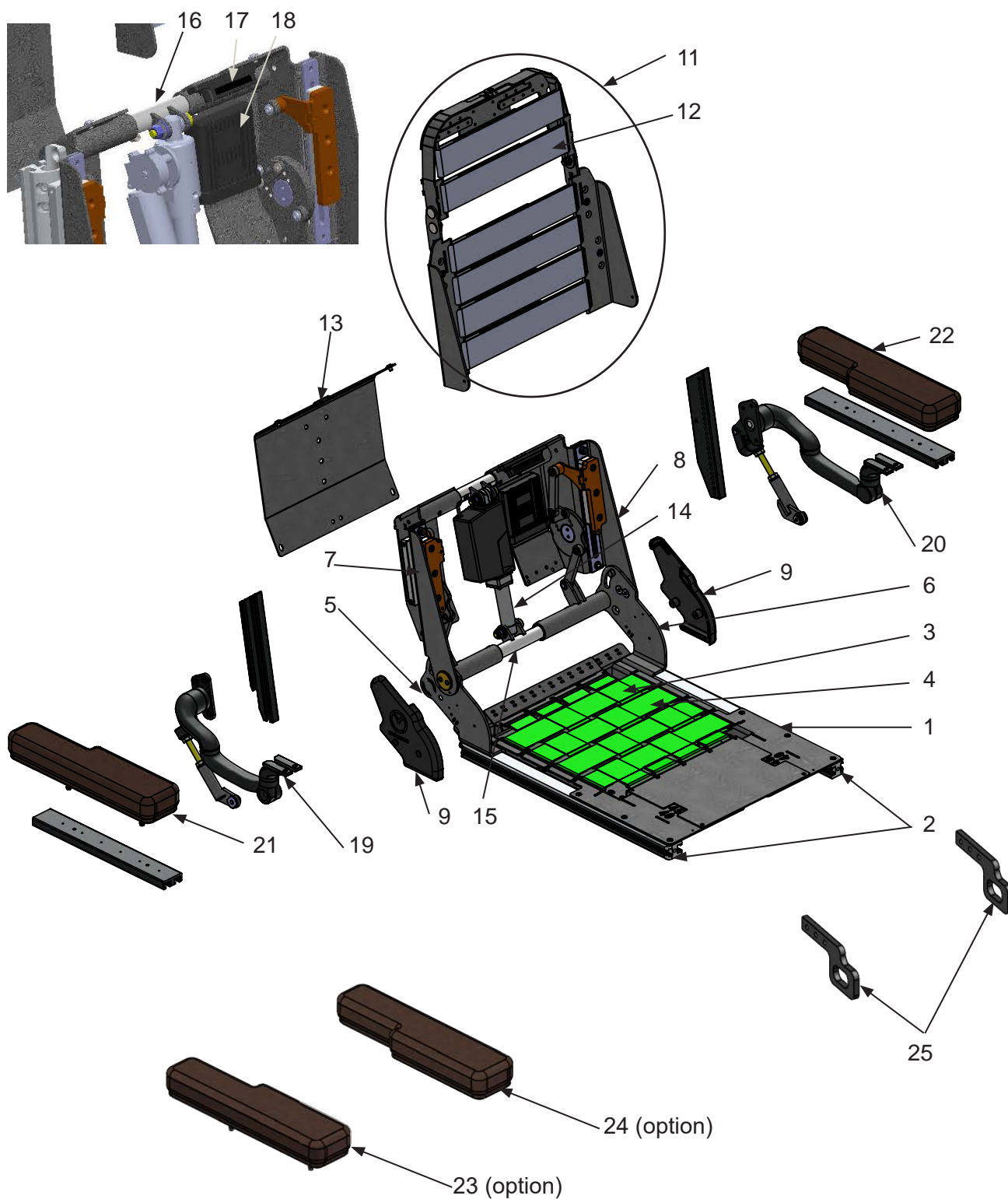

MC 1124 Child

Spinalus-2 MC 1124 uden puder Spinalus-2 MC 1124 without cushions

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/ quant.
1	2407-1371	Sæderamme 28-38 cm komplet med gjorder og C-skiner, Spinalus-3	Seat frame 28-38 cm complete, w/webbing and C-rails, Spinalus-3	1
2	2407-1378	C-skinne dobbelt for sæderamme 28-38 cm, Spinalus-3 barn	Double C-rail for seat frame 28-38 cm, Spinalus-3 child	2
3	2407-1481	Gjord for sæderamme, langsgående, Spinalus 3 barn	Webbing for seat frame, longitudinal, Spinalus 3 child	3
4	2407-1480	Gjord for sæderamme, tværgående m/justering, Spinalus 3 barn	Webbing for seat frame, transverse w/adjustment, Spinalus 3 child	3
5	2407-1382	Hængsel beslag, højre, komplet, Spinalus-3 barn	Hinge bracket, right, complete, Spinalus-3 child	1
6	2407-1381	Hængsel beslag, venstre, komplet, Spinalus-3 barn	Hinge bracket, left, complete, Spinalus-3 child	1
7	2407-1386	Sidehængselplade, højre, komplet, Spinalus-3 barn	Side hinge plate, right, complete, Spinalus-3 child	1
8	2407-1385	Sidehængselplade, venstre, komplet, Spinalus-3 barn	Side hinge plate, left, complete, Spinalus-3 child	1
9	2407-1535	Afskærmningskit, hængsler H/V Spinalus-3 barn	Cover for back rest hinges, right/left, Spinalus-3 child	1
11	2407-1536	Rygramme 28-38 cm, komplet m. gjorder, Spinalus-3 [CN]	Backrest frame 28-38 cm, complete w/webbing, Spinalus-3	1
12	2407-1479	Gjord for rygramme 28-38 cm Spinalus-3 barn	Webbing for backrest frame 28-38 cm, Spinalus-3 child	6
13	2407-1396	Ryg bagplade, Spinalus-3 barn	Rear cover, Spinalus-3 child	1
14	2405-1747	Aktuator Spinalus-3 barn TA29 60mm 4500N	Recline actuator, Spinalus-3 child TA29 60mm 4500N	1
15	2407-1383	Aksel, bund 28-38 cm, Spinalus-3 barn	Axle for actuator 28-38 cm, bottom, Spinalus-3 child	1
16	2407-1384	Aksel, øverst, Spinalus-3 barn	Axle for actuator, top, Spinalus-3 child	1
17	2405-1452	R-net 4-stik for buskabel (option)	R-net 4-way connector for bus cable (option)	1
18	2405-1273	Aktuatorboks, 6+L R-net	Actuator box 6+L R-net	1
19	2407-1423	Armlæn, H, base, Spinalus-3, Barn	Armrest R, base, Spinalus-3, child	1
20	2407-1422	Armlæn, V, base, Spinalus-3, Barn	Armrest L, base, Spinalus-3, child	1
21	2407-1466	Armlæns pude m/C-skinne Spinalus-3, 70x210mm højre	Armrest cushion w/C-rail, Spinalus-3, 70x210mm right	1
22	2407-1467	Armlæns pude m/c-skinne, Spinalus-3, 70x210mm venstre.	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x210mm left.	1
	2407-1468	Armlæns pude m/c-skinne, Spinalus-3, 70x260mm højre	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x260mm right	1
	2407-1469	Armlæns pude m/c-skinne, Spinalus-3, 70x260mm venstre.	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x260mm left.	1
	2407-1470	Armlæns pude m/c-skinne, Spinalus-3, 70x300mm højre	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x300mm right	1


MC 1124 Child

Spinalus-2 MC 1124 uden puder Spinalus-2 MC 1124 without cushions

Pos.	Del/part no.	Benævnelse	Part name	Antal/quant.
	2407-1471	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 70x300mm venstre.	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x300mm left.	1
	2407-1472	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 70x350mm højre	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x350mm right	1
	2407-1473	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 70x350mm venstre.	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x350mm left.	1
	2407-1474	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 70x400mm højre	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x400mm right	1
	2407-1475	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 70x400mm venstre.	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 70x400mm left.	1
	2407-1476	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 100x350mm højre	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 100x350mm right	1
	2407-1477	Armlænsputede m/c-skinne, Spinalus-3, 100x350mm venstre.	Armrest cushion w/c-rail, Spinalus-3, 100x350mm left.	1
23	2407-1533	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X210 højre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X210 right..	1
24	2407-1534	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X210 venstre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X210 left..	1
	2407-1525	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X260 højre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X260 right..	1
	2407-1526	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X260 venstre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X260 left..	1
	2407-1527	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X300 højre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X300 right..	1
	2407-1528	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X300 venstre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X300 left..	1
	2407-1531	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X350 højre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X350 right..	1
	2407-1532	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X350 venstre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X350 left..	1
	2407-1529	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X400 højre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X400 right..	1
	2407-1530	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X400 venstre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 70X400 left..	1
	2407-1523	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 100X350 højre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 100X350 right..	1
	2407-1524	Armlænsputede MC1124/MC1144/Mini Crosser X 100X350 venstre.	Armrest cushion MC1124/MC1144/Mini Crosser X 100X350 left..	1
25	2406-1736	Løs krogøje for C-skinne, Spinalus-3	Hook eye for C-rail, Spinalus-3	2


MC 1124 Child

Spinalus-2 MC 1124 uden puder
 Spinalus-2 MC 1124 without cushions

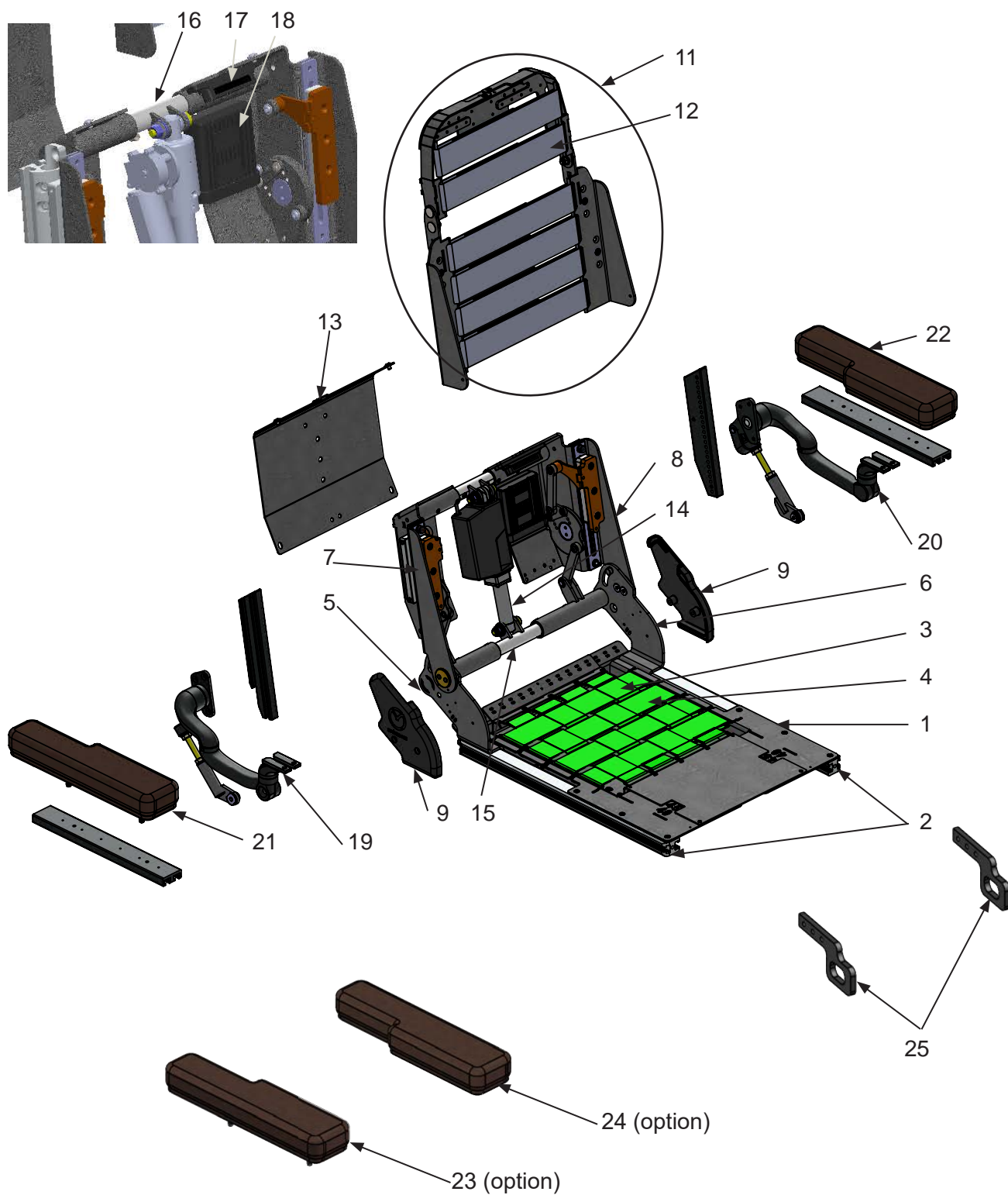

MC 1124 Child

Fodstøtte aktuator Footrest actuator part

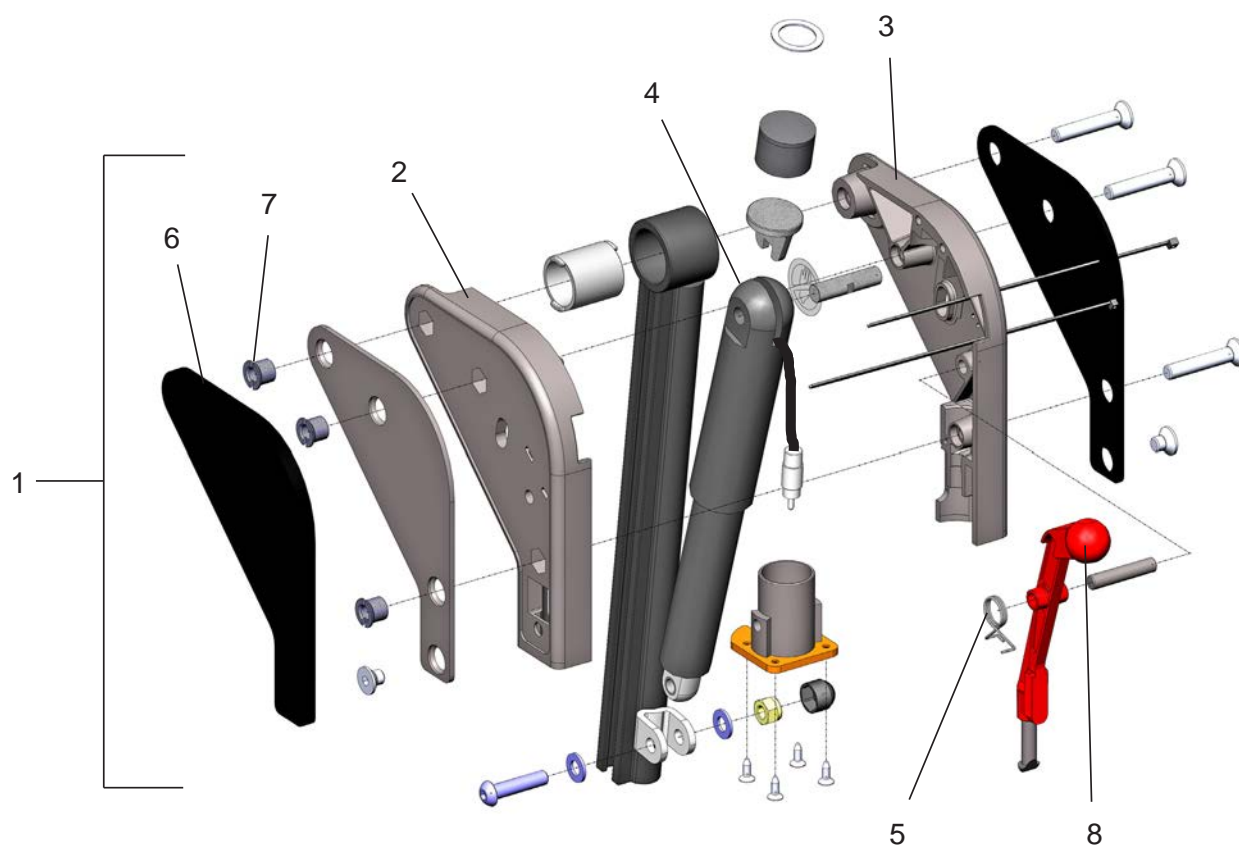


MC 1124 Child

Fodstøtte aktuator del Footrest actuator part

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1166	Fodstøtte aktuator del højre	Footrest actuator part right	1
1	2408-1167	Fodstøtte aktuator del venstre	Footrest actuator part left	1
2	2408-1081	Benstøttehoved venstre	Legrest head left	1
3	2408-1082	Benstøttehoved højre	Legrest head right	1
4	2408-1182	Aktuator del elbenstøtte komplet	Actuator part electric legrest complete	1
5	2408-1085	Fjeder for lås benstøtte	Spring for lock, legrest	1
6	2408-1178	Knæled beskytter, højre	Knee protector, right	1
6	2408-1179	Knæled beskytter, venstre	Knee protector, left	1
7	2408-1088	M8 møtrik special	M8 special nut	3
8	2408-1185	Låseenhed benstøtte	Locking device for legrest	1

MC 1124 Child

Beslag for fodstøtte Bracket for footrest

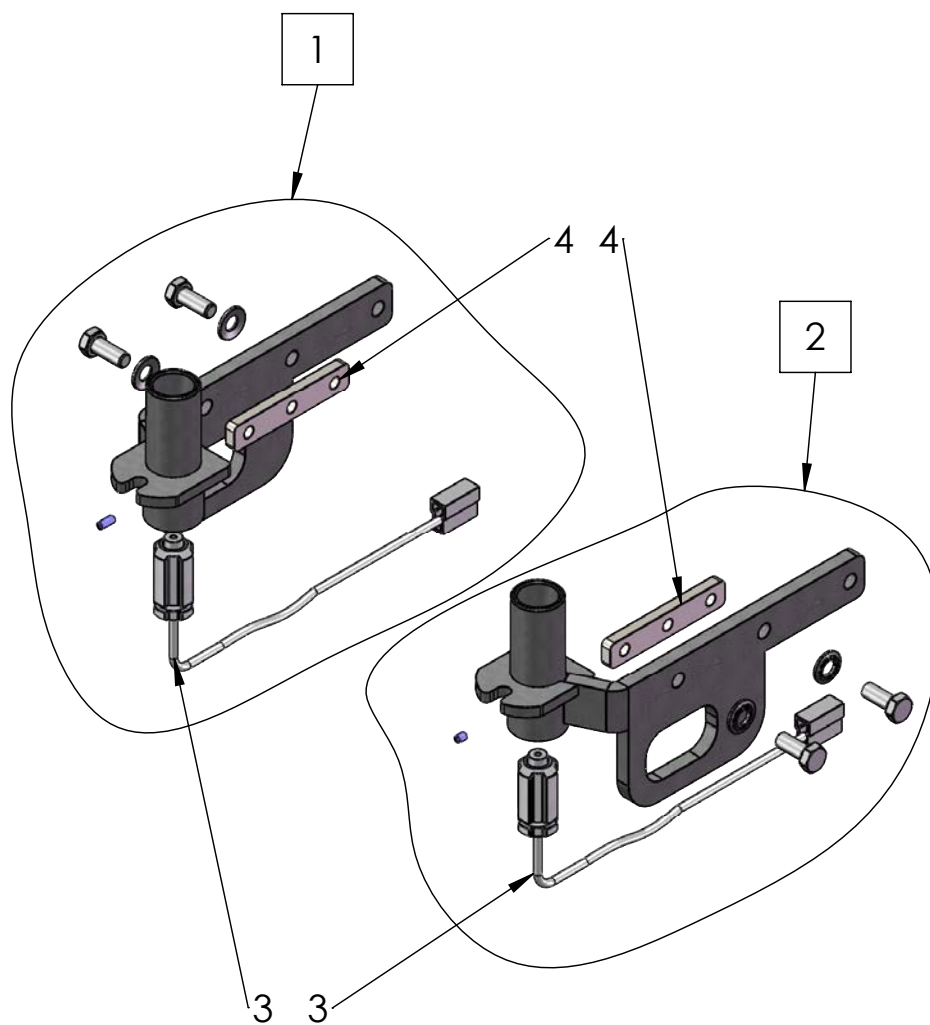


MC 1124 Child

Beslag for fodstøtte Bracket for footrest

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1510	Monteringsbeslag for benstøtte, højre, Spinalus-3	Bracket for legrest, right, Spinalus-3	1
2	2408-1511	Monteringsbeslag for benstøtte, venstre, Spinalus-3	Bracket for legrest, left, Spinalus-3	1
3	2408-1181	Stik benstøtte med ledning komplet	Plug for legrest complete w/ cable	1
4	2407-1164	Laske for C-skinne, M8	Bracket for C-rail, M8	

MC 1124 Child

Fodstøtte elektrisk barn
Footrest electric child

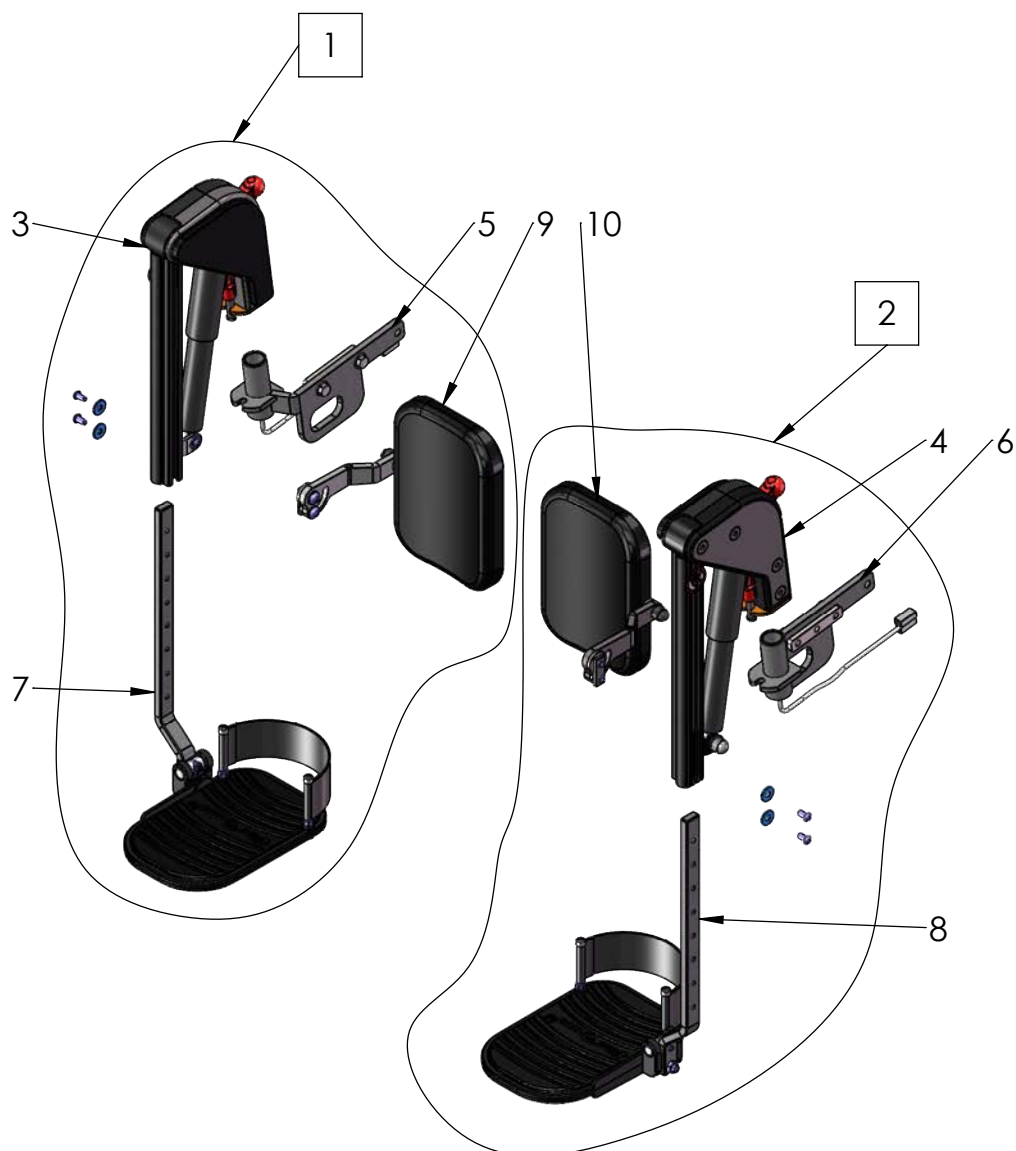


MC 1124 Child

Fodstøtte elektrisk barn Footrest electric child

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1530	Fodstøtte EL barn, højre, SB35-40 cm Spinalus-3	Footrest electric child, right, SB35-40 cm Spinalus-3	1
2	2408-1531	Fodstøtte EL barn, venstre, SB35-40 cm Spinalus-3	Footrest electric child, left, SB35-40 cm Spinalus-3	1
3	2408-1166	Fodstøtte actuatordel, højre	Footrest actuator part, right	1
4	2408-1167	Fodstøtte actuatordel, venstre	Footrest actuator part, left	1
5	2408-1510	Beslag for benstøtte, højre, Spinalus-3	Bracket for legrest, right, Spinalus-3	1
6	2408-1511	Beslag for benstøtte, venstre, Spinalus-3	Bracket for legrest, left, Spinalus-3	1
7	2408-1168	Fodplade højre, SB35 cm	Footplate right, SB35-40 cm	1
8	2408-1171	Fodplade venstre, SB35 cm	Footplate left, SB35-40 cm	1
9	2408-1384	Lægpude højre komplet, SB35-40 cm	Calf rest right, SB35-40 cm	1
10	2408-1164	Lægpude venstre komplet, SB35-40 cm	Calf rest left, SB35-40 cm	1

MC 1124 Child

Fodstøtte manuel barn Footrest manual child

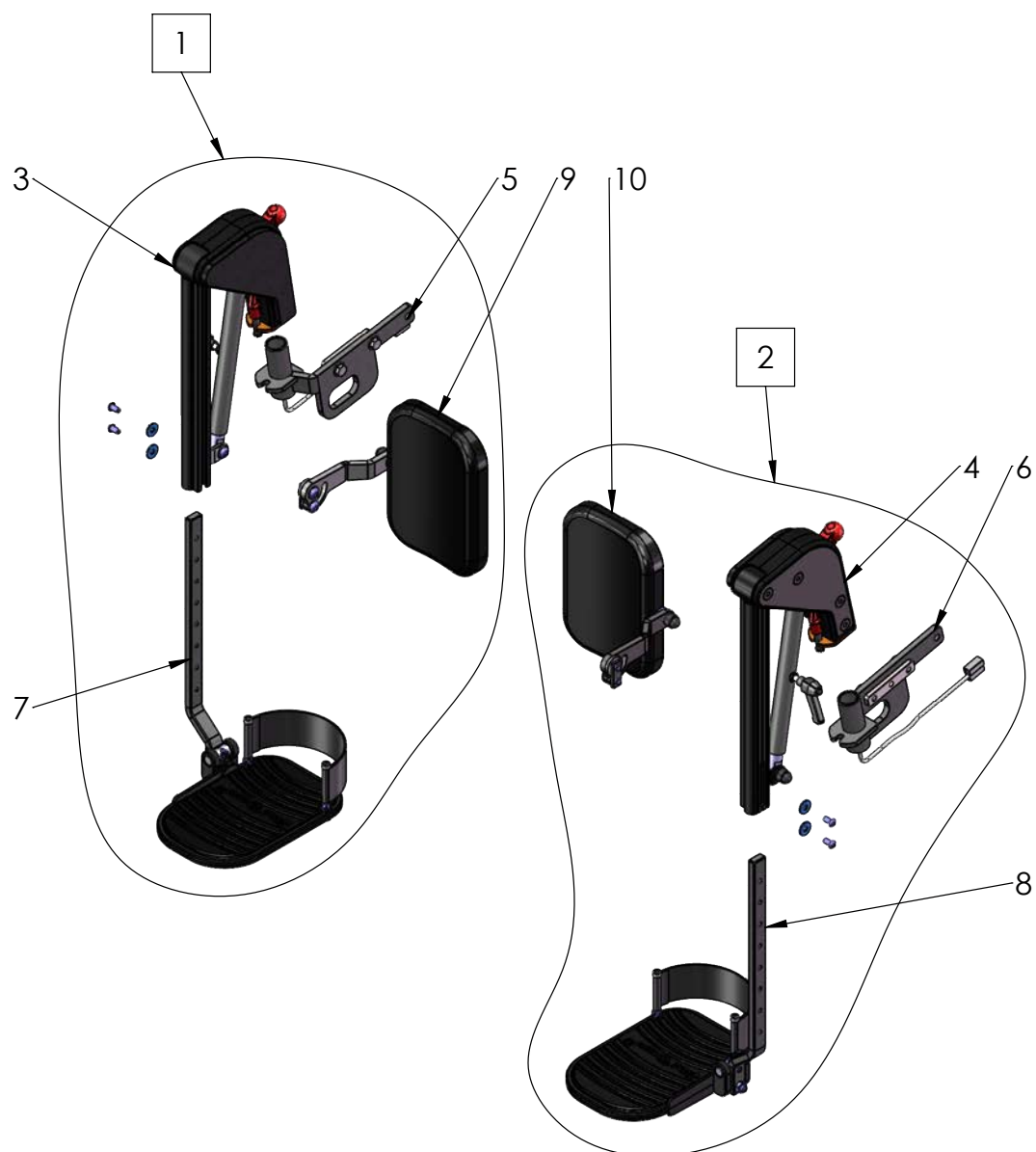


MC 1124 Child

Fodstøtte manuel barn Footrest manual child

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1532	Fodstøtte manuel barn, højre, SB35-40 cm Spinalus-3	Footrest manual child, right, SB35-40 cm Spinalus-3	1
2	1508-1533	Fodstøtte manuel barn, venstre, SB35-40 cm Spinalus-3	Footrest manual child, left, SB35-40 cm Spinalus-3	1
3	2408-1234	Fodstøtte toppart, højre manuel	Footrest top part, right manual	
4	2408-1235	Fodstøtte toppart, venstre manuel	Footrest top part, left manual	
5	2408-1510	Beslag for benstøtte, højre, Spinalus-3	Bracket for legrest, right, Spinalus-3	1
6	2408-1511	Beslag for benstøtte, venstre, Spinalus-3	Bracket for legrest, left, Spinalus-3	1
7	2408-1168	Fodplade højre, SB35 cm	Footplate right, SB35-40 cm	1
8	2408-1171	Fodplade venstre, SB35 cm	Footplate right, SB35-40 cm	1
10	2408-1384	Lægpude højre komplet, SB35-40 cm	Calf rest right complete, SB35-40 cm	1
10	2408-1164	Lægpude venstre komplet, SB35-40 cm	Calf rest right complete, SB35-40 cm	1

MC 1124 Child

Fodplade Foot plate

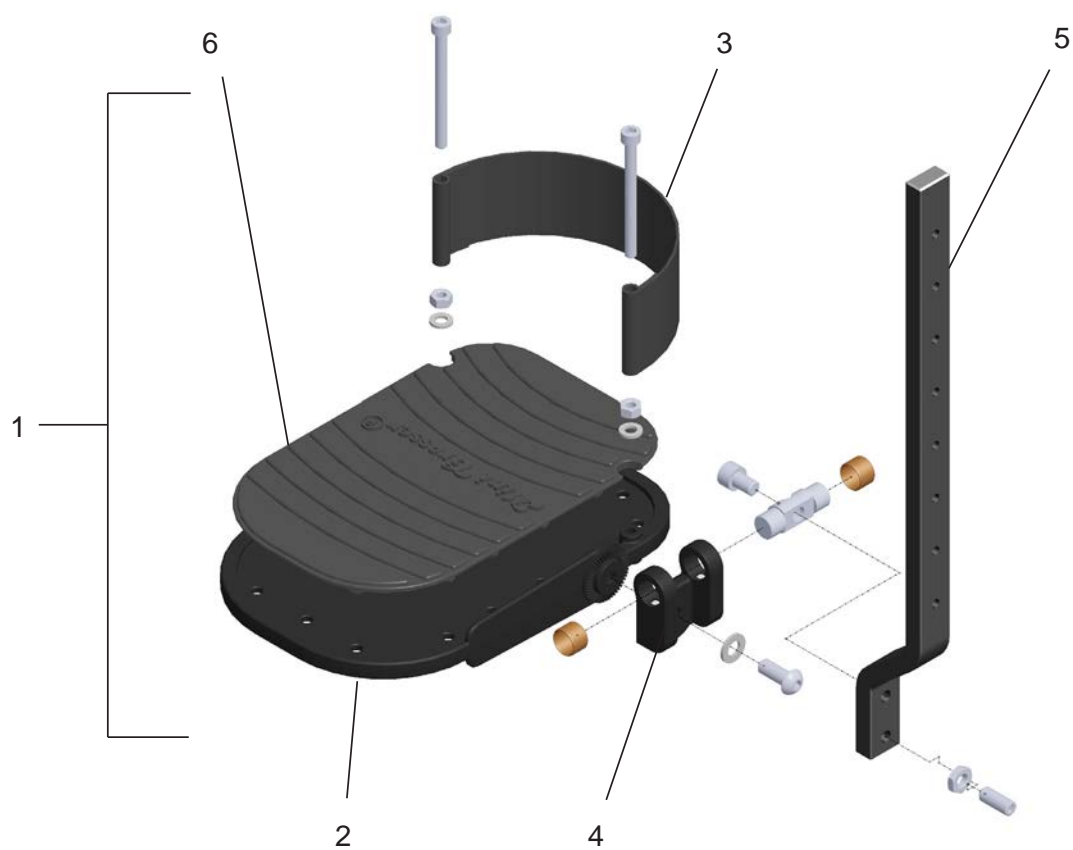


MC 1124 Child

Fodplade Foot plate

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1168	Fodplade højre SB35	Footplate right SB35	1
1	2408-1171	Fodplade venstre SB35	Footplate left SB35	1
1	2408-1176	Fodplade junior / barn højre	Footplate junior / child right	1
1	2408-1177	Fodplade junior / barn venstre	Footplate junior / child left	1
2	2408-1079	Fodplade aluminium	Footrest aluminum	1
3	2408-1187	Hælstrop alu fodplade	Heel strap alu footplate	1
4	2408-1208	Emne vinkling fodplade	Hinge angulation, footplate	1
5	2408-1175	Profil underdel el-benstøtte SB35	Profile lower part electric-legrest SB35	1
6	2408-1174	Måtte alufodplade	Mat aluminium footplate	1

MC 1124 Child

Central fodplade, elektrisk barn
Central foot plate, electric child

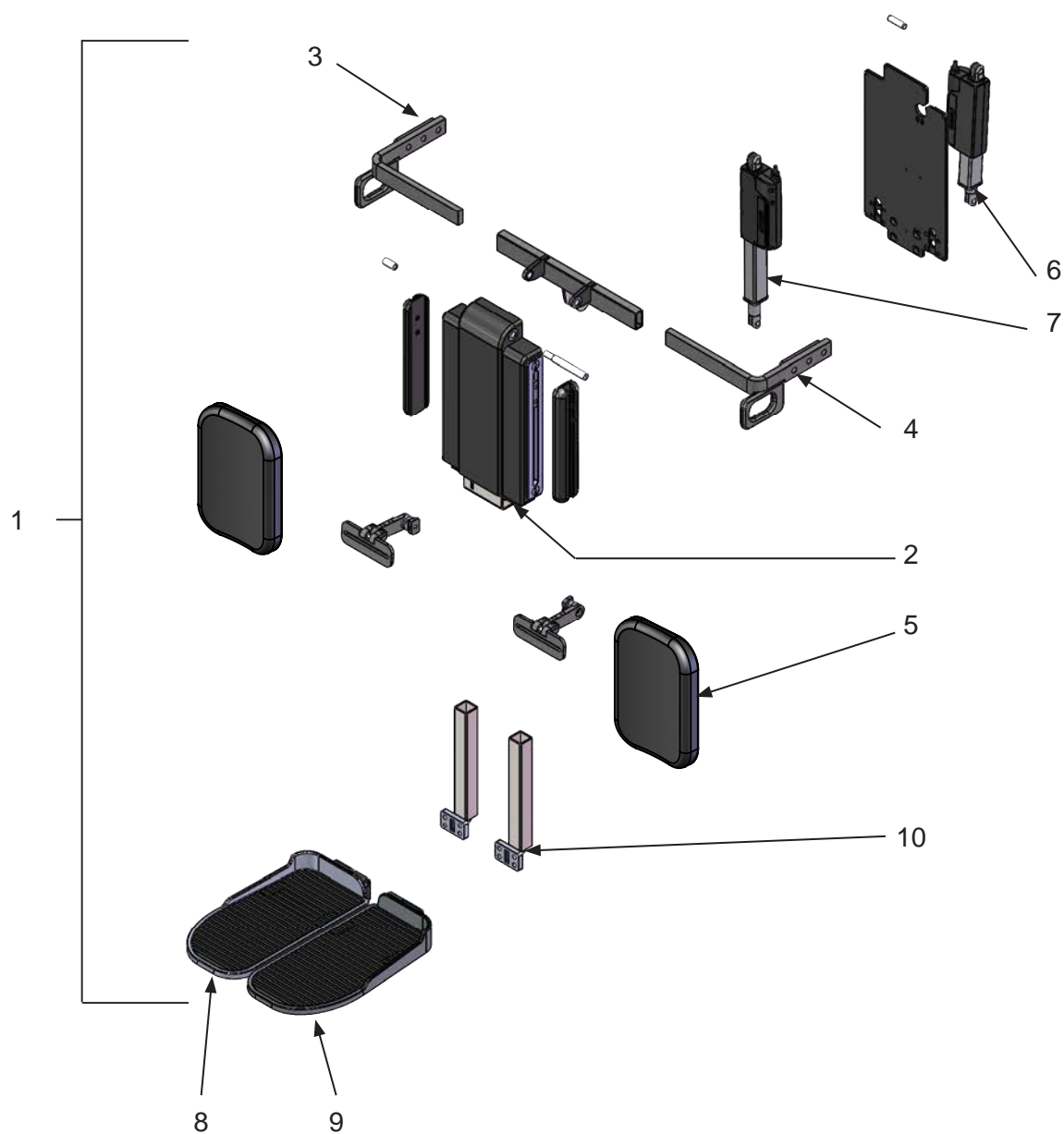


MC 1124 Child

Central fodplade, elektrisk barn Central foot plate, electric child

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1477	Benstøtte central EL, barn, Spinalus-3	Central foot plate, child, electric, incl. calf rest, Spinalus-3	1
2	2408-1515	Tårn komplet benstøtte central EL	Tower complete for central electric footrest	1
3	2408-1534	Montagebeslag højre, central benstøtte EL barn, Spinalus-3	Mounting bracket right, for central electric footrest child, Spinalus-3	1
4	2408-1516	Montagebeslag venstre, central benstøtte EL barn, Spinalus-3	Mounting bracket left, for central electric footrest child, Spinalus-3	1
5	2408-1513	Lægstøtte child H/V, Spinalus-3	Calf rest II complete, R/L	2
6	2405-1750	Aktuator, yder, TA38M 100mm, Spinalus-3	Actuator, outer, TA38M 100mm, Spinalus-3	1
7	2405-1751	Aktuator, inder, TA38M 150mm, Spinalus-3	Actuator, inner, TA38 150mm, Spinalus-3	1
8	2408-1480	Fodplade barn, højre, Spinalus-3	Foot plate, child, right, Spinalus-3	1
9	2408-1479	Fodplade barn, venstre, Spinalus-3	Foot plate, child, left, Spinalus-3	1
	2405-1752	Elektronik central benstøtte	Electronic, central electric footrest	1
10	2408-1537	Benstøtte justeringsprofil, EL standard	Adjusting profile for central electric footrest, standard	1
	2408-1538	Benstøtte justeringsprofil, EL forhøjet	Adjusting profile for central electric footrest, standard	1

MC 1124 Child

Central fodplade lang, barn, manuel
Central foot plate long, child, manual

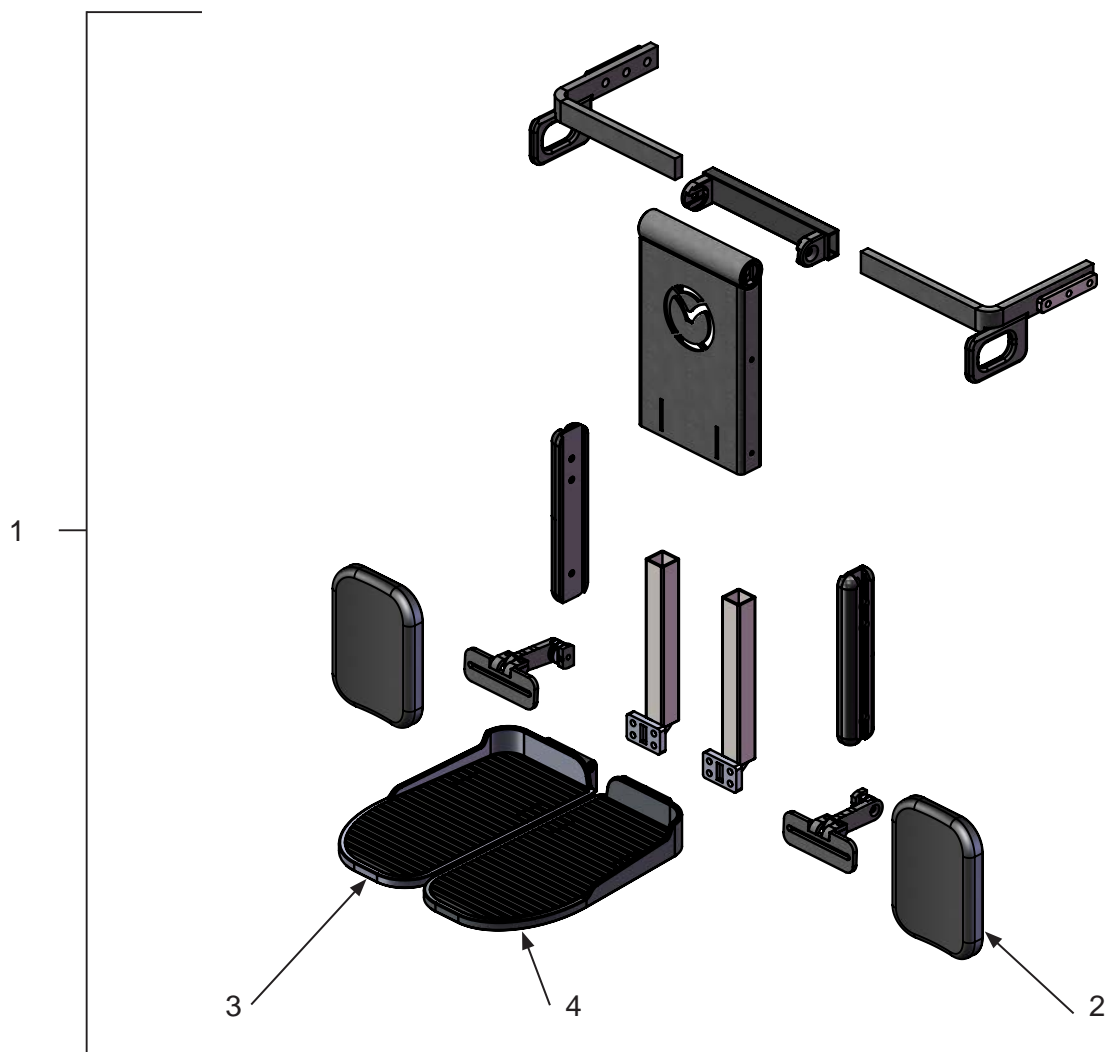


MC 1124 Child

Central fodplade lang, barn, manuel
Central foot plate long, child, manual

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1478	Benstøtte central manuel, barn, lang, Spinalus-3	Central foot plate long, child, manual Spinalus-3	1
2	2408-1513	Lægstøtte barn H/V, Spinalus-3	Calf rest child R/L, Spinalus-3	2
3	2408-1480	Fodplade barn, højre, Spinalus-3	Foot plate, child, right, Spinalus-3	1
4	2408-1479	Fodplade barn, venstre, Spinalus-3	Foot plate, child, left, Spinalus-3	1

MC 1124 Child

Central fodplade kort, barn, manuel
Central foot plate short, child, manual

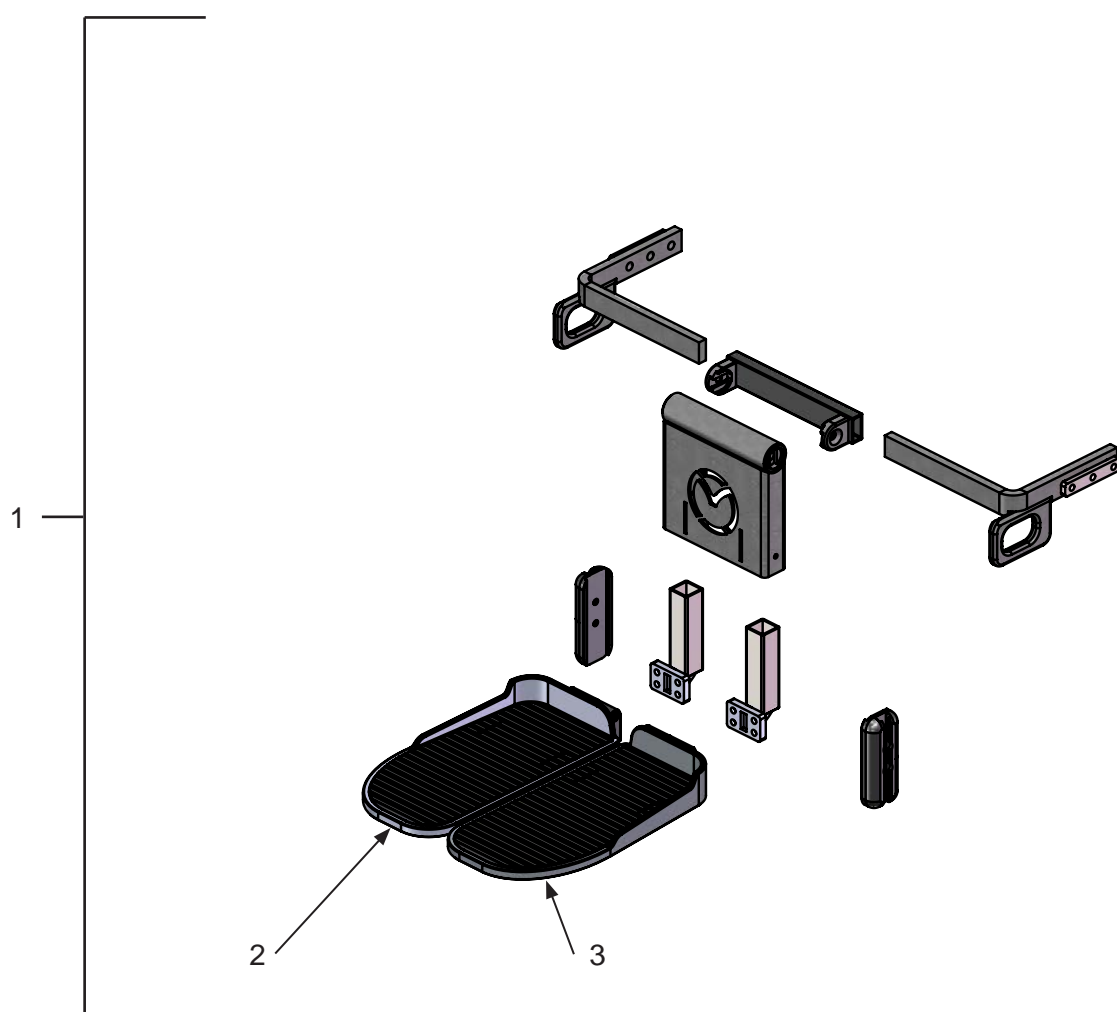


MC 1124 Child

Central fodplade kort, barn, manuel
Central foot plate short, child, manual

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2408-1505	Benstøtte central manuel, barn, kort, Spinalus-3	Central foot plate short, child, manual Spinalus-3	1
2	2408-1480	Fodplade barn, højre, Spinalus-3	Foot plate, child, right, Spinalus-3	1
3	2408-1479	Fodplade barn, venstre, Spinalus-3	Foot plate, child, left, Spinalus-3	1

MC 1124 Child

Sving væk joystickholder Swing-away joystick mount

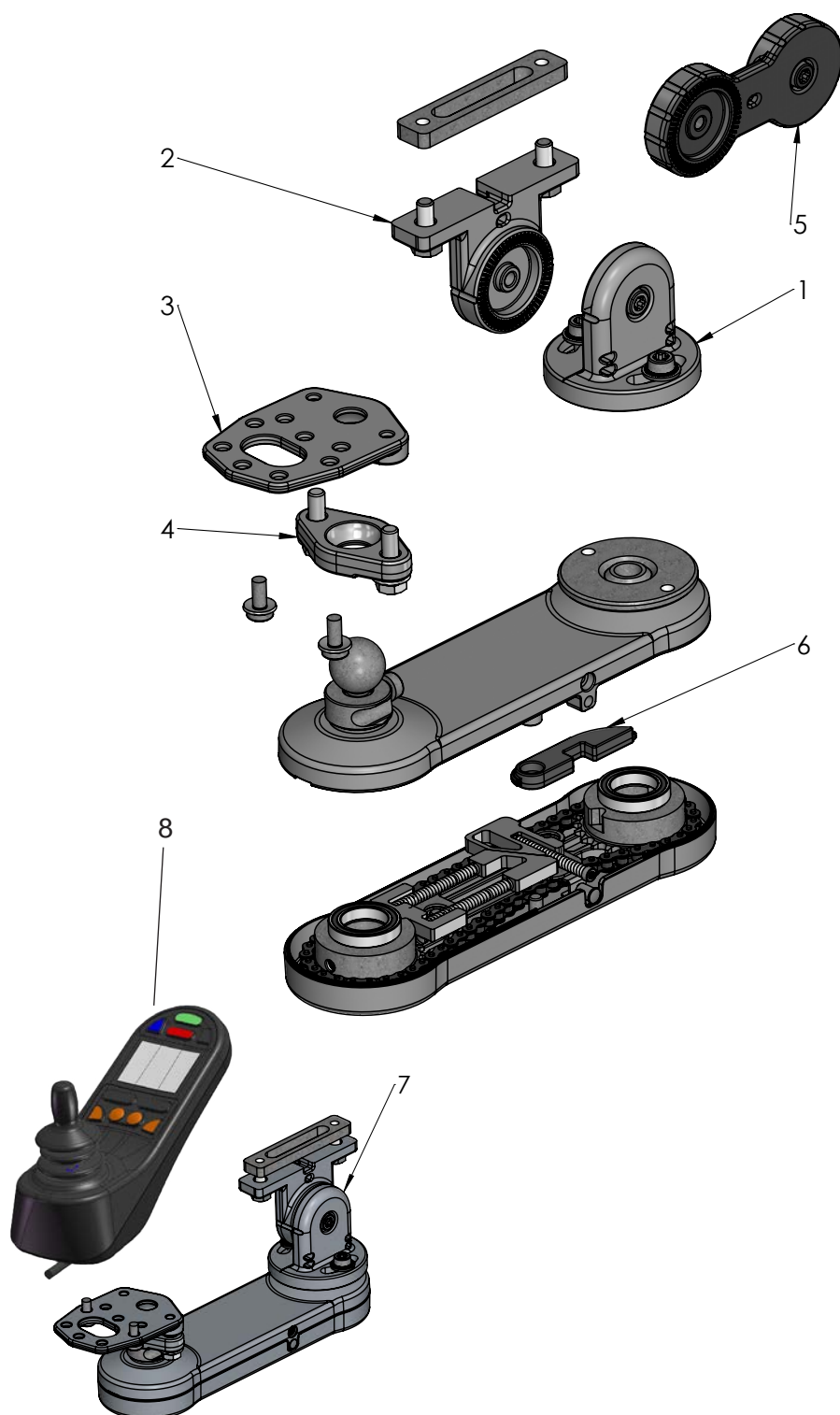




MC 1124 Child

Sving væk joystickholder Swing-away joystick mount

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2406-1012	Justeringsbeslag for Sving væk	Adjustment bracket for Swing away	1
2	2406-1007	Justeringsbeslag for armlæn	Adjustmen bracket for armrest	1
3	2406-1039	Multibeslag for joystick	Multi bracket for joystick	1
4	2406-1040	Spændebeslag for joystick	Bracket for joystick	1
5	2406-1050	Mellemedssæt for Sving væk	Middle joint set for Swing away	1
6	2406-1622	Kædestrammer sæt	Chain strainer set	1
7	2406-1042	Sving væk for Spinalus-2/3	Swing away for Spinalus-2/3	1
8	2405-1272	Joystick R-NET, CJSM1-L-SW, color	Joystick R-NET, CJSM1-L-SW, color	1

MC 1124

EI-dele MC 1124 Electric parts MC 1124

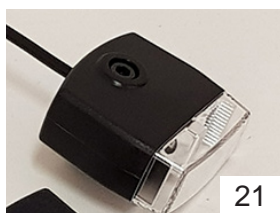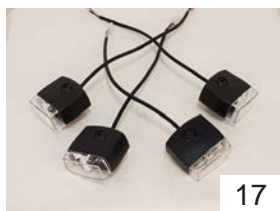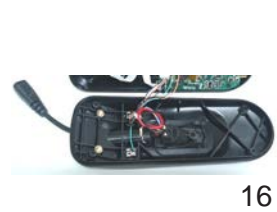

MC 1124

El-dele MC 1124 Electric parts MC 1124

Pos	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	2405-1272	Joystick R-net CJSM1-L-SW, color	Joystick R-net CJSM1-L-SW, color	1
2	2405-1273	Aktuatorboks 6+L R-net	Actuatorbox 6+L R-net	1
3	2405-1274	Power module R-net 120A	Power module R-net 120A	1
4	2405-1448	Termosikring med flysikring 70A	Thermal fuse with flight air safety 70A	1
5	1523-1111	Batteri HAZE GEL HZY-EV12-55	Battery HAZE GEL HZY-EV12-55	2
6	1523-1141	Lader VICTRON IMPULSE II 8A	Charger VICTRON IMPULSE II 8A	1
		Kabler	Cables	
7	2405-1603	Aktuator kabel, Spinalus-2/3	Actuator cable, Spinalus-2/3	1
8	2405-1606	Batteri til styring, kabel, MC 1124	Battery for control, cable, MC 1124	1
9	2405-1607	Batterikabel, MC 1124 m. rødt håndtag	Battery cable, MC 1124 w. red handle	1
10	2405-1608	Batteri mellemkabel, MC 1124	Cable between batteries	1
11	2405-1459	Buskabel R-net, 0,3 m	Bus cable R-net, 0,3 m	
	2405-1457	Buskabel R-net, 0,5 m	Bus cable R-net, 0,5 m	
	2405-1276	Buskabel R-net, 1 m	Bus cable R-net, 1 m	
	2405-1305	Buskabel R-net, 1,2 m	Bus cable R-net, 1,2 m	
	2405-1441	Buskabel R-net, 1,5 m	Bus cable R-net, 1,5 m	
	2405-1458	Buskabel R-net, 2,0 m	Bus cable R-net, 2,0 m	
	2405-1275	Buskabel R-net, 2,5 m	Bus cable R-net, 2,5 m	
12	2405-1597	R-net Y-kabel	R-net Y-cable	1
13	2405-1452	Buskabel fordelerdåse til 4 stik, R-net	Bus cable distributor box for 4 connectors	1
		Optioner	Options	
14	2405-1615	Gyro modul, R-net	Gyro modul, R-net	
15	2405-1738	Reservekabel for R-net CJSM2 Joystick / bluetooth	Spare part - cable for R-net CJSM2 Joystick / bluetooth.	
16	2405-1055	Reservekabel for R-net CJSM1 Joystick	Spare part - cable for R-net CJSM1 Joystick	
17	2406-1739	For- og baglyskit komplet, MC 1124 Spinalus-3	Front- and back light set complete, MC 1124 Spinalus-3	1
18	2406-1737	For- og baglyskit, højre, MC 1124 Spinalus-3	Front- and back light set, right, MC 1124 Spinalus-3	
19	2406-1738	For- og baglyskit, venstre, MC 1124 Spinalus-3	Front- and back light set, left, MC 1124 Spinalus-3	
20	2406-1741	Aktuator kabel, central benstøtte EL, Spinalus-3	Actuator cable central electric footrest Spinalus-3	



medemagroup