



medemagruppen

Armlens høyde og bredde

Åpne glidelåsen på baksiden. Løsne unbraconskruene, så kan armlenet skyves opp og ned etter behov. Bredden kan nå også justeres 25 mm ut per side.

Vinkelen på armlenet

Ved hjelp av justeringskruen på armlenet kan vinkelen endres med ca. 60°. Armlenet kan foldes helt opp for enklere forflytning.

Hev og senk styret

Styret kan justeres i høyden, opp/ned. Fjern først gummiheften foran, løsne unbraconskruen. Juster høyden, trekk til skruen igjen.

Styrevinkel

Styret justeres forover/bakover ved hjelp av håndtaket. Trekk håndtaket ned og trekk styret nærmere deg for den beste kjørestillingen.

Sete forover/bakover.

Løft håndtaket opp for å frigjøre setet fra glide-skinnen. Deretter kan setet justeres forover eller bakover. Når håndtaket slippes, låses setet automatisk ved nærmeste stoppunkt.

Seterotasjon

Trekk håndtaket tilbake for å snu setet. Setet kan snus til hver side med stopp ved hver 45°.

Setehøyde opp/ned

Løft av setet. Skru ut låseskruen, juster setestolpen til ønsket posisjon og trekk til skruen og deretter låsemutteren.

Ryggstøtte og setedybde


Løsne skruene på begge sider nederst. Nå kan setedybden justeres ved å skyve seteryggen forover eller bakover.

Vinkelen på nakkestøtten

Hodestøtten kan også vippes forover eller bakover.

Regulering av hodestøtten

Trykk på knappen på setet og du kan heves eller senkes nakkestøtten etter behov.

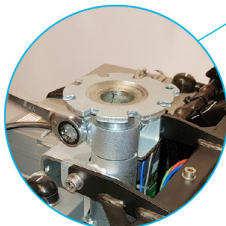

De riktige innstillingene skaper de rette forholdene

Mini Crosser tilbyr avanserte seteløsninger. En god sittestilling er viktig for å kunne kjøre scooteren din trygt og sikkert. Vi viser her de vanligste justeringene for å tilpasse scooteren til brukeren.





medemagruppen

Medema Norge AS - Stamveien 6 - 148 Hagan - Tlf: 67 06 49 00 - firmapost@medema.no - www.medema.com